


MERCUR		FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		FTP:BC0017-JU		Revisão: 001	
Produto: BOLSA TÉRMICA NATURAL CERVICAL							
IDENTIFICAÇÃO				FISCAL			
Tamanho		Referência	Código Interno	Classificação Fiscal		IPI	ICMS
Grande		BC0017-JU	B060017-JU	6307.90.90		0%	Tributado
Composição		Tecido: 100% algodão orgânico Parte interna: caroço do fruto da palmeira Juçara.					
Prazo de validade		3 anos					
INFORMAÇÕES DO PRODUTO E EMBALAGEM							
		Embalagem Inner		Embalagem Máster			
Comprimento (cm)		29,5		43			
Largura (cm)		13,5		31,5			
Altura (cm)		8,0		15			
Peso Médio (Kg)		1,580		7,900			
Empilhamento Máximo de Caixa Máster		-		7			
Quantidade de Peças na Embalagem		1		5			
Código de Barras		7896342914944			17896342914941		
CARACTERÍSTICAS GERAIS							
ANVISA		81284250012					
Introdução		<p>Essa bolsa térmica proporciona praticidade e conforto para aplicação de calor ou frio terapêutico e foi desenvolvida com a intenção de cuidar das pessoas e da natureza (www.mercur.com.br).</p> <p>Foi construída em um formato que se adapta facilmente a região cervical. Porém, pode ser utilizada em diferentes partes do corpo.</p>					
Atributos		<p>Tratamento térmico não-invasivo Matérias-primas naturais Capa lavável para higienização</p>					
Precauções		<p>Ler todas as informações desta embalagem ajuda no uso correto da bolsa. Elas foram elaboradas pensando nos benefícios que o produto pode oferecer para você, quando utilizado de forma segura e adequada.</p> <p>O uso inadequado da bolsa pode causar queimaduras, especialmente quando aquecida além do tempo indicado.</p> <p>O aquecimento além do tempo indicado pode danificar o produto</p> <p>Pessoas com sensibilidade ao calor ou com problemas circulatórios, devem consultar um profissional antes de aplicar o produto.</p> <p>Se a temperatura parecer desagradável utilize o produto envolvido em uma toalha ou aguarde alguns minutos para aplicar o produto novamente.</p> <p>Pessoas com sensibilidade ao calor/frio ou com problemas circulatórios devem consultar um profissional de saúde antes de aplicar o produto.</p> <p>A aplicação deste produto é recomendada por aproximadamente 20 minutos ou conforme orientação de um profissional da saúde.</p> <p>A Bolsa é reutilizável.</p> <p>Quando usada por crianças ou idosos, deverá ter o acompanhamento de um responsável.</p> <p>É recomendável a orientação de um profissional da saúde.</p> <p>Evite o uso sobre lesões abertas (cortes, úlceras, feridas).</p> <p>Quando não estiver em uso, conserve ao abrigo do calor, da luz e da umidade.</p> <p>Por ser um produto natural, ao aquecer, poderá liberar algum resquício de umidade, por isso, é importante lembrar de, ao final do uso, sempre secar em ambiente arejado antes de armazenar.</p> <p>Por se tratar de um produto natural o seu aquecimento produz cheiro característico. Embora a sensação de frio percebida possa ser menor em razão da capa protetora de algodão, o produto atinge temperatura negativa ao ser resfriado e pode causar queimaduras.</p> <p>Distribua os caroços para ter um aquecimento ou resfriamento mais uniforme.</p> <p>O tempo de aquecimento é indicado para o produto em temperatura ambiente, se a bolsa já estiver aquecida e for necessário retornar ao micro-ondas ou forno, reduza o tempo de aquecimento indicado.</p> <p>O produto é indicado ser aquecido e resfriado com capa.</p>					

<p>Indicações</p>	<p>Essa bolsa térmica natural é indicada para a aplicação de calor e frio terapêuticos (termoterapia).</p> <p>Quente</p> <p>Diminuição de tensões e dores musculares: dor nas costas (lombalgia, cervicalgia), dor ciática, torcicolos e contraturas;</p> <p>Alívio de cólicas (em bebês, menstruais e abdominais);</p> <p>Tratamento de lesões nas articulações e músculos em fase crônica: processos degenerativos articulares artrose; entorses; estiramentos e contusões musculares; tendinite, bursite e outros processos inflamatórios crônicos;</p> <p>Alívio de dor de cabeça causada por tensão muscular na região cervical (Cefaleia Tensional);</p> <p>Diminuição da rigidez nas articulações após períodos de imobilização;</p> <p>Relaxamento e aquecimento corporal, gerando conforto e bem-estar.</p> <p>Fria:</p> <p>Diminuição de dores musculares (decorrentes de traumas, contusões, pancadas);</p> <p>Alívio para dores agudas (dores de dente, enxaqueca) e febre;</p> <p>Redução de edemas e hematomas leves;</p> <p>Alívio em caso de picadas de inseto;</p> <p>Atenuação de olheiras e inchaços do rosto;</p> <p>Relaxamento e descanso para a área dos olhos (em especial usuários de lente de contato e quem trabalha muito tempo em frente ao computador);</p> <p>Tratamento de queimaduras leves (como as provocadas por excesso de exposição solar);</p> <p>Pós-operatórios de cirurgias faciais (plásticas, odontológicas);</p> <p>Pré/pós-aplicação de injeções/vacinas</p>
<p>Modo de usar</p>	<p>Como aquecer sua bolsa:</p> <p>No forno micro-ondas: Certifique-se de que ela não esteja encostando em nenhuma das paredes laterais.</p> <p>Aqueça por 3 minutos, em potência entre 600 a 800 W.</p> <p>No forno elétrico: Coloque a bolsa dentro de uma fôrma para evitar contato direto com paredes e grelhas.</p> <p>Aqueça a bolsa por 30 minutos a 100°C com dourador desligado.</p> <p>Ao aquecer, por se tratar de um produto natural, talvez você perceba um odor característico do caroço da palmeira Juçara.</p> <p>Como aplicar sua bolsa:</p> <p>Antes de aplicar ao corpo, verifique se a temperatura está confortável ao toque e, se necessário, aguarde alguns minutos para aplicar na região desejada.</p> <p>Aplique por aproximadamente 20 minutos ou conforme a orientação do profissional de saúde.</p> <p>Como resfriar sua bolsa:</p> <p>No congelador ou freezer: Por 3 horas</p> <p>Para proteger da umidade do congelador ou freezer, envolva a bolsa em um plástico ou por um vasilhame isolante.</p> <p>Como aplicar sua bolsa:</p> <p>Após o resfriamento ou aquecimento, verifique se a temperatura está confortável ao toque, espalhe bem os caroços e, se necessário, aguarde alguns minutos antes de aplicar na região desejada.</p> <p>Aplique por aproximadamente 20 minutos ou conforme a orientação do profissional de saúde.</p>
<p>Você sabia que está cuidando do seu bem-estar, da sua saúde e do meio ambiente?</p>	<p>As Bolsas Térmicas Naturais Mercur nasceram para proporcionar o conforto do tratamento térmico, mas com um cuidado especial com as pessoas e a natureza: Representam uma alternativa mais natural e não invasiva de tratamento, em formatos que se adaptam ao corpo e são fáceis de higienizar (capa lavável).</p> <p>Sua composição e formatos foram construídos com a participação de diversas pessoas, combinando a experiência de usuários com os conhecimentos técnicos da indústria e das entidades parceiras na cadeia do algodão agroecológico e a rede de produtores de Açaí Juçara.</p> <p>Suas matérias-primas são o algodão orgânico e o caroço de Açaí Juçara em processos de agroecologia (diversidade), provenientes de instituições cujas práticas de manejo primam pelo mínimo impacto ambiental, relações de produção sem exploração humana e pautadas pelo comércio justo e solidário.</p> <p>Visam a preservação da natureza mantendo saudáveis e conservados os biomas em que se inserem.</p> <p>A utilização do caroço, subproduto da extração de açaí da Palmeira Juçara, promove o aproveitamento de um resíduo anteriormente sem destinação ambiental adequada, ampliando o valor agregado na produção local e mantendo de pé estas árvores ameaçadas de extinção.</p> <p>O desenvolvimento e a geração de renda local também fazem parte do propósito que envolve a Mercur e as comunidades produtoras de algodão orgânico e extração de Açaí Juçara.</p>

Modo de lavar	<p>A bolsa é composta por uma capa externa e um enchimento.</p> <p>Higienização da capa externa: quando necessário remova o enchimento e lave somente a capa com água e sabão neutro e deixe secar à sombra.</p> <p>Higienização do enchimento: quando necessário limpe a superfície com um pano úmido.</p> <p>Não mergulhe o enchimento em água e lembre-se de expor ao sol para secar.</p> <p>Tanto em relação à capa quanto ao enchimento, evite usar produtos químicos, para a conservação de sua bolsa.</p>
----------------------	--