

INSTRUÇÕES DE USO

1. **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Capa Protetora Descartável Estéril Esterili-Med.
2. **COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:** Fabricado em filme de polietileno de média/alta densidade, com espessura mínima de 0,13 micras, embalado de forma unitária em envelope Papel Grau Cirúrgico.
3. **MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:** Óxido de etileno.
4. **INSTRUÇÕES DE USO:**
 - a. O produto deverá ser colocado em uma mesa, onde deverá ser removido de sua embalagem;
 - b. Verificar a integridade da embalagem do produto, certificando-se de que esta esteja íntegra e isenta de danos;
 - c. Abrir a embalagem (a embalagem deverá ser aberta somente no local de uso);
 - d. Manusear com técnica asséptica;
 - e. Desdobrar a Capa e colocar sobre o paciente de acordo com os procedimentos padrão.
5. **CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO:** A Capa Protetora Descartável deve ser manuseada com técnica asséptica.
6. **PRECAUÇÕES:** A Capa Protetora Descartável não requer nenhuma precaução ou cuidado especial, necessitando apenas dos cuidados padrão para manuseio de produto estéril.
7. **ADVERTÊNCIAS:**
 - Produto de uso único.
 - Não utilizar se a embalagem estiver violada.
 - Produto isento de látex.
 - Manusear com técnica asséptica.
 - Descartar após o uso, de acordo com a legislação de tratamento de resíduos hospitalares.
 - Proibido reprocessar.
8. **FORMAS DE ARMAZENAMENTO:** Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar.
9. **CONTRA INDICAÇÕES:** O produto não possui contra indicações.
10. **REGISTRO NA ANVISA:** 10417460001