

OPA HLD

Código: FT 068

Revisão: 00

Emissão: Março/2020

DESCRIÇÃO

O OPA HLD[®] tem como princípio ativo o ortoftalaldeído a 0,55 %. É um desinfetante de alto nível para uso em artigos semicríticos, podendo ser utilizado em instrumentos odonto-médico-hospitalares. Pode ser utilizado em sistemas manuais (recipientes plásticos ou bandejas), possui compatibilidade com polipropileno, polietileno, polipropileno preenchido com vidro e/ou plásticos de policarbonato, butadieno-estireno (ABS). Em reprocessadora de endoscópios automatizados deve ser utilizado conforme as instruções do fabricante do equipamento.

INDICAÇÕES

O OPA HLD[®] é um produto “Pronto Uso” indicado para desinfecção de artigos semicríticos, para reprocessamento de instrumentais e equipamentos médicos termossensíveis.

ADVERTÊNCIAS

PERIGO! CAUSA DANOS SE INGERIDO.

Usar equipamentos de proteção individual adequados como: luvas de borracha, máscaras, óculos de proteção, avental e botas de proteção. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Não misturar com outros produtos.

Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.

Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias.

“Água: pode faltar. Não desperdice.”

INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUÇÕES DE ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize luva e óculos de proteção.

O OPA HLD[®] é um produto pronto uso não devendo ser diluído em água ou ser misturado com outros produtos.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

OPA HLD

Código: FT 068

Revisão: 00

Emissão: Março/2020

PROCESSO MANUAL: lavar, enxaguar e secar previamente os artigos conforme o padrão ou protocolo de limpeza validado. Na sequência mergulhe-os por completo na solução com o produto puro deixando em contato por 10 minutos. Enxágue-os com água estéril, filtrada ou de boa procedência e na sequência seque-os.

PROCESSAMENTO AUTOMATIZADO: siga as instruções do fabricante, verificando sempre se o artigo foi lavado e secado previamente antes do ciclo da desinfecção.

O OPA HLD[®] possui uma fita indicativa de teor, o **OPA HLD Test[®]** que mede a concentração de ortoftalaldeído no uso de banho por imersão. O teor ortoftalaldeído não pode ficar abaixo de 0,55%, se o teor estiver abaixo, troque imediatamente a solução que está em uso. Observar sempre os recipientes utilizados para imersão, onde os mesmos devem estar limpos e, se durante o uso da solução surgir resíduos orgânicos ou inorgânicos, a solução deve ser descartada imediatamente. Consulte no rótulo as instruções de uso da fita.

APRESENTAÇÕES

5000 ml – Caixa contendo 2 galões.

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos.

*Demais apresentações sob consulta para vendas.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.”

“PROIBIDO A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.”

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

“PERIGO! CAUSA DANOS SE INGERIDO.”

TELEFONE DE EMERGÊNCIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CEATOX - 0800-0148110.

“CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA.”

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

OPA HLD

Código: FT 068

Revisão: 00

Emissão: Março/2020

PRIMEIROS SOCORROS

EM CASO DE CONTATO COM OLHOS OU A PELE: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar cuidadosamente com água em abundância durante 15 minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL: Lave a boca. Não provoque vômito. Consulte um médico, imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. EM CASO DE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO: Remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

COMPOSIÇÃO

Ortoftaldeído, Hidrogeno fosfato de potássio, Aditivo, Benzotriazol, Ácido N-(hidroxietil) – etilenediaminetriacético (HEDTA), Agente regulador de pH e Água.

PRINCÍPIO ATIVO: Ortoftaldeído 0,55 %.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... De incolor a levemente amarelado.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Líquido límpido.

pH:..... 7,0 a 7,5.

Densidade:..... 0,990 a 1,015 g/ml.

Teor de Ortoftaldeído:..... 0,495 a 0,605 %.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

OPA HLD

Código: FT 068

Revisão: 00

Emissão: Março/2020

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Manter o produto em sua embalagem original, em local seco e ventilado, afastado da luz solar direta, fontes de calor, materiais incompatíveis, combustíveis e gases comprimidos.

DESCARTE

Resíduo do produto: **OPA HLD[®]** não pode ser descartado diretamente na rede de esgoto por se tratar de um produto não biodegradável e poluente, onde o mesmo deve ser neutralizado com Glicina (**VIC GLICINA[®]**) seguindo as indicações contidas na rotulagem ou deve ser recolhido por uma empresa especializada em descarte de materiais perigosos. O procedimento de descarte deve seguir o protocolo da instituição.

Em caso de derramamento, diluir com água em abundância ou recolher o material com absorvente inerte, como sílica ou areia.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.

OPA HLD - 1L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8034.001-6.

OPA HLD - 5L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8034.002-4.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br