

Indicação de Uso/Finalidade

Indicado para uso médico/odontológico para auxiliar em procedimentos e/ou cirurgias.

Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de ação

Instrumentos articuláveis e não articuláveis com características cortantes e não cortantes conforme NBR 7153, NBR 13851, NBR 13852, NBR 13916.

Modo de Uso do Produto

De acordo com prática profissional e técnicas aplicadas.

Método de esterilização

Esterilizar em Autoclave por 10 minutos a 134º Celsius

Condições de Armazenamento

Armazenar em local seco e limpo.

Condições para o Transporte

Transportar sem violar a embalagem.

Condições de manipulação

Lave-o imediatamente após a utilização. Lave o instrumental somente com sabão neutro a 1% e nunca utilize solução salina ou desinfetante para o enxágue. Soluções químicas são altamente corrosivas devendo ser evitadas. Use sempre água destilada ou desmineralizada a fim de evitar a concentração de metais pesados presentes na mesma, evitando assim incrustações e manchas na superfície do instrumental. Seque completamente o instrumento antes de esterilizá-lo, nunca o deixando secar “ao natural”.

Advertências

Esterilize o instrumental sempre aberto em autoclave, nunca tencionado ou fechado na última cremalheira. Proteja as pontas do instrumental mais delicado e de tesouras com gaze. Nunca armazene instrumental limpo em caixas cirúrgicas manchadas ou com riscos acentuados (podem ser focos de contaminação). Faça manutenção periódica de todos os equipamentos envolvidos no preparo e esterilização do instrumental. O local de estocagem deve ser distante de fonte de água, janelas e portas abertas e tubulações expostas.

Precauções

Reutilizável. Não estéril. Todo instrumental deve ser submetido à esterilização antes de ser utilizado.

Contraindicações / Efeitos adversos

Não se aplica.

Resp. Técnico: CLEZIO LIRA CREA/SP 5063036834

Fabricado e Distribuído por:

ICE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ESMERALDA LTDA - EPP

Rua Tibiriça, 368 – Aldeia do Sol (Jd. Jurupari) – Cajamar – SP – Cep 07792-040

43.576.016/0001-50

Notificação ANVISA nº:

Responsável Técnico
CLEZIO LIRA

Responsável Legal
DAVI DE CATIGERÓ DELGADO