

KIT CIRÚRGICO PARTO NORMAL ESTÉRIL POLAR FIX

Modelo comercial: com variações entre largura e comprimento.

Indicação de uso: Garantir a devida proteção do paciente e do profissional da saúde, minimizando transferências cruzadas de agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos. Combina conforto, maleabilidade e alta resistência ao rasgo e fricção.

Instrução de uso:

- 1- Cobertura de Mesa de Instrumentos: Posicionar no centro da mesa e abrir no sentido da largura da mesa (direita/esquerda);
- 2 - Campo superior: Posicionar o campo, fixando a fita adesiva na região abdominal do paciente, segurando as extremidades e puxando no sentido da haste até fixá-la.
- 3 – Campo inferior: Posicionar o campo sob o quadril do paciente. O campo será fixado apenas com o peso do paciente.
- 4 – Perneira: Posicionar nos membros inferiores, aderindo a fita.
- 5 – Manta para RN: Envolver o recém-nascido após o nascimento
- 6 – Bolsa: Aderir no local desejado.

Composição: 1º item) Cobertura de mesa de instrumentos: Confeccionadas com filme de polietileno + reforço absorvente. 2º item) Campo Superior: Confeccionados em 100% polipropileno. Possui reforço absorvente de viscose laminada a uma camada de polietileno. 3º item) Campo Inferior: Confeccionados em 100% polipropileno. Possui reforço absorvente de viscose laminada a uma camada de polietileno. 4º item) Manta para o RN: Confeccionadas com 70% viscose e 30% poliéster. 5º item) Perneiras: Confeccionados em 100% polipropileno. 6º item) Bolsa: 100% polietileno.

Advertências / Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

Condições de armazenamento: Armazenar em local limpo e seco.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Anvisa nº: 8003400082

Produto esterilizado por óxido de etileno.

Fabricado por: Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP
CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64 - Indústria Brasileira
Responsável Técnica: Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339
Atendimento ao cliente: SAC: 0800 191099 – sac@polarfix.com.br – www.polarfix.com.br