

### **Indicação de Uso**

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios, auxílio no tratamento fisioterapêutico, entorse, contusão, distensão, condromalácia, edema, tendinite, bursite, instabilidade patelar, luxação, periartrite, pré e pós-artroscopia, lesões de ligamentos e tendões, artrite reumatoide, entre outras. CONSULTE UM ESPECIALISTA.

### **Modo de Uso do produto**

Aplicar conforme indicação.

Solte todos os fechos aderentes. Com o membro estendido, posicione o produto de forma que o orifício fique centralizado na patela. Ajuste a aba superior e fixe o velcro elástico em torno da coxa. Ajuste a aba inferior e fixe o velcro elástico em torno da perna. Por fim, fixe os dois ajustes extras superiores para cima e os dois ajustes extras inferiores para baixo.

### **Condições de Armazenamento**

Armazenamento: Manter em local protegido de chuva, umidade e luz direta.

Preferencialmente armazenar o produto em sua embalagem original.

Faixa de temperatura ambiente de armazenamento: - 10°C a + 60°C.

Faixa de umidade relativa de armazenamento: 30% a 95% (não condensante).

### **Condições para o Transporte**

Ao transportar proteja a embalagem da chuva direta.

Evite quedas durante o transporte.

Faixa de temperatura ambiente de transporte: - 10°C a + 60°C.

Faixa de umidade relativa de transporte: 30% a 95% (não condensante).

### **Condições de Manipulação**

Lavagem normal até 30°C; Lavar somente à mão; Não usar alvejante à base de cloro; Não secar em tambor rotativo; Não passar; Não lavar a seco; Secagem à sombra.

### **Precauções**

O produto não apresenta contraindicação, desde que sejam respeitadas as instruções de utilização e finalidade ao qual se destina. Consulte um especialista. Não utilize sobre a pele lesionada, ferida, alérgica e durante o sono. Caso ocorra alguma irritação, suspenda imediatamente o uso e contate um médico.

Não utilizar sem indicação médica.