


<b>MERCUR</b>		<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUTO</b>		FTP: BC0137		Revisão: 000	
Produto: <b>SUPORTE COM BOLSA TÉRMICA GEL PARA TRATAMENTO OROFACIAL E DTM</b>							
IDENTIFICAÇÃO				FISCAL			
Tamanho	Referência	Código Interno	Classificação Fiscal	IPi	ICMS		
Único	BC0137	B060137	6307.90.90	0,0%	Tributado		
<b>Composição</b>	<b>Capas:</b> Tecido interno: poliamida e elastano. Tecido externo e fecho aderente: poliamida. Tiras: poliéster e elastano. Filme: camadas de poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada externa. <b>Gel:</b> água purificada, polímero vinílico, trietanolamina, conservante e agente anticongelante.						
	<b>Prazo de validade</b>	3 anos					
INFORMAÇÕES DO PRODUTO E EMBALAGEM							
	Peça	Embalagem Inner	Embalagem Máster				
<b>Dimensões</b>	9,5cm x 5,9cm x 25,7cm	9,5cm x 6cm x 20cm	31cm x 26,5cm x 27,5cm				
<b>Peso</b>	570g	621g	7,90Kg				
<b>Quantidade na Embalagem</b>		1 peça	caixa com 12 peças				
<b>Código de Barras</b>		7896342402199	17896342402196				
<b>Empilhamento Máximo da Caixa Máster</b>	4						
<b>Empilhamento Máximo do Pallet</b>	12 caixas máster no lastro / 4 caixas másters de altura / total de 48 caixas máster no pallet						
CARACTERÍSTICAS GERAIS							
<b>ANVISA</b>	81284250002						
<b>Introdução</b>	<p>O produto proporciona terapia térmica invasiva não invasiva para o alívio dos sintomas das Disfunções Temporomandibulares (DTM) e de Dores e de Dores Orofaciais (DOF). Desenvolvido em conjunto com usuários e profissionais especialistas para garantir um tratamento adequado, com segurança, conforto e praticidade, permite aplicação simultânea dos dois lados da face e da região cervical, com mãos livres. É um produto com design anatômico e exclusivo, composto por bolsas de gel envolvidas em capas removíveis que, ao ser aplicado, promove alívio de dores e tensões musculares. Ajustável para variadas circunferências de cabeça, é hipoalergênico, dermatologicamente testado e possui registro Anvisa.</p>						
<b>Precauções</b>	<p>Ler todas as informações desta embalagem ajuda no uso correto do suporte, elas foram elaboradas pensando nos benefícios que o produto pode oferecer.</p> <p>O uso inadequado pode causar queimaduras. Respeite as orientações indicadas.</p> <p>Para sua segurança, use sempre a bolsa térmica gel com a capa.</p> <p>Pessoas com sensibilidade ao calor, ao frio ou com problemas circulatórios devem consultar um médico antes da aplicação do produto.</p> <p>Não utilize em regiões anestesiadas e sobre lesões abertas (cortes, úlceras, feridas).</p> <p>O tempo de aquecimento é indicado para o produto em temperatura ambiente. Se a bolsa já estiver aquecida e for necessário retorná-la ao micro-ondas ou água quente, reduza o tempo de aquecimento indicado. Se ela estiver resfriada, aguarde alguns minutos até que esteja em temperatura ambiente antes de aquecer.</p> <p>Se a temperatura parecer desagradável, interrompa o uso e aguarde alguns minutos antes de aplicar novamente.</p> <p>É recomendada a orientação de um profissional da saúde para aplicação deste produto.</p> <p>Não deite ou apoie peso sobre as bolsas.</p> <p>As bolsa não devem ser mantidas por longos períodos em água quente. O aquecimento constante e prolongado pode reduzir sua resistência, favorecendo rompimento.</p> <p>Não use objetos pontiagudos para manusear as bolsas de gel.</p> <p>Verifique se existem furos ou rasgas nas bolsas de gel antes de usar o produto. Neste caso, descarte-as.</p> <p>O gel não é tóxico, porém, em caso de ruptura, não o ingira. Se o gel entrar em contato com a pele, lave com água em abundância e consulte um oftalmologista.</p> <p>Produto reutilizável.</p> <p>Ao final da aplicação, deixe o produto em local arejado para que seque completamente antes de guardá-lo.</p> <p>Quando não estiver em uso, sempre cubra o orifício de calor de uma das unidades.</p>						
<b>Indicações</b>	<p>Este produto é indicado principalmente para aplicação de CALOR, promovendo alívio em casos de:</p> <p>Dores e tensões musculares na região da face decorrentes da DTM e DOF (espasmos musculares associados ou não a travamentos mandibulares e estalos articulares).</p> <p>Dores e tensões musculares provenientes do Bruxismo.</p> <p>Dores e tensões musculares na região cervical decorrentes da DTM e DOF (cervicogênica e tensional).</p> <p>DTM articular em fase crônica.</p> <p>Tensão da musculatura facial, como em casos de estresse.</p> <p>A aplicação de FRIO auxilia nos seguintes situações:</p> <p>DTM articular em fase aguda (inflamatória).</p> <p>Pós-traumas, edemas e hematomas faciais.</p> <p>Processos inflamatórios agudos no face.</p> <p>Pós-cirúrgicos e procedimentos bucomaxilofaciais imediatos (dentários, estéticos, cirurgia ortognática).</p> <p>Procure a orientação de um profissional da saúde para o tratamento adequado.</p>						

**Modo de usar**


- 1 - Coloque a bolsa gel com a descrição em branco "lado esquerdo" na capa com as tiras fixas, seguindo a direção da seta.
- 2 - Da mesma forma, coloque as outras bolsas nas respectivas capas.
- 3 - Posicione as peças de mesmo formato uma sobre a outra, de forma espelhada, com o tecido liso voltado para dentro.
- 4 - Fixe as tiras nas áreas demarcadas **A** mais próximas e seu produto estará pronto para uso.

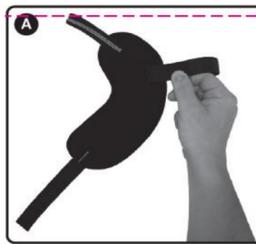

**COMO AQUECER E RESFRIAR O PRODUTO:**

Água Quente (somente bolsas gel)	Micro-ondas com água (somente bolsas gel)	Micro-ondas sem água (produto completo)	Congelador ou freezer (protegendo da umidade)
 3min	 3min30s potência 600 a 800 W	 1min30s potência 600 a 800 W	 1h30min

Aqueça as bolsas preferencialmente em água quente. Em um recipiente com água quente: remova as capas e mergulhe somente as bolsas de gel em 3 litros de água fervendo (fora do fogo) por 3 minutos. **No micro-ondas, com água:** remova as capas e mergulhe somente as bolsas de gel em um recipiente próprio para micro-ondas com água, aquecendo por até 3 min30s. Certifique-se de que as bolsas estejam completamente imersas. Caso opte por aquecer as bolsas **no micro-ondas, sem água:** abra as tiras aderentes e leve o produto completo (capas e bolsas gel) para aquecer, por 1min30s, de modo que as peças não fiquem dobradas ou sobrepostas **B**.

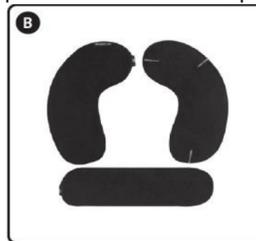

Após o aquecimento, se necessário, siga os passos de montagem do produto e espalhe bem o gel para uniformizar a temperatura. Aplique por aproximadamente 20 minutos ou conforme a orientação do profissional. Caso indicada, a terapia de calor úmido pode ser aplicada com este produto, basta utilizar água morna para umedecer o tecido do suporte após aquecê-lo. Para resfriar, leve o produto completo (capas e bolsas gel) ao freezer/congelador por 1h30min. Caso exceda o tempo indicado, orientamos aguardar atingir a temperatura ambiente e reiniciar o processo de resfriamento. Evite o contato direto com as paredes do freezer para não danificar o produto. Para proteger da umidade, envolva o produto em um saco plástico ou recipiente isolante próprios para congelamento. Após o resfriamento, espalhe bem o gel para uniformizar a temperatura. Aplique por aproximadamente 10 minutos ou conforme a orientação do profissional. Caso indicada, a terapia de frio úmido pode ser aplicada com este produto, basta utilizar água fria para umedecer o tecido do suporte após retirá-lo do freezer/congelador. Informações resumidas sobre aquecimento/resfriamento também podem ser encontradas na etiqueta interna do produto.

**COMO APLICAR SUA BOLSA:**

**Orientações para bolsas laterais:** Para melhor conforto, antes de vestir procure prender o cabelo e remover acessórios como óculos e brincos grandes.

- 1- Posicione o produto na frente do rosto, de modo que o logotipo Mercur fique posicionado do lado esquerdo e para cima, e a tira verde voltada para trás da cabeça. Solte a tira preta inferior **C**.



- 2 - Encaixe o produto de cima para baixo na cabeça, posicionando as bolsas sobre o masseter (lateral do rosto/bochechas) e o temporal (acima das orelhas);
- 3 - Fixe a tira inferior abaixo do queixo. Procure não cobrir as orelhas com o produto. Se necessário, reajuste as tiras de modo que o produto fique adequado e confortável ao tamanho do rosto.
- 4 - Distribua o gel uniformemente dentro das bolsas, pressionando de baixo para cima.

**Orientações para a bolsa cervical:**

- 1 - Abra os fechos aderentes e posicione o produto na nuca, fixando-o nas bolsas laterais.
- 2 - Procure passar as tiras logo abaixo da orelha **D**, suavemente, de modo que não interfira no posicionamento das bolsas laterais.



<b>Atributos</b>	<p>Aplicação bilateral simultânea, com mãos livres.  Abrange músculos faciais e cervicais.  Prático: pode ser aquecido em água quente ou no micro-ondas.  Capa lavável.  Anatômico e ajustável.</p>
<b>Modo de limpar</b>	<p><b>Capas:</b> lavar manualmente com sabão neutro em água até 40°C, sem lavar ou secar em máquina, nem utilizar produtos clorados e solventes para remover manchas. Ao secar, mantenha na sombra, na posição vertical, sem torcer. Este produto não pode ser limpo a seco, passado a ferro, nem receber vaporização ou tratamento a vapor. Ao lavar, mantenha os fechos aderentes unidos ou cobertos para evitar danos ao produto.  <b>Bolsas gel:</b> higienizar com água e sabão. Par desinfetar, use álcool. Estas informações ajudam na manutenção adequada do produto.</p>
<b>Descarte da embalagem</b>	<p>Esse produto tem como embalagem uma caixa de papel, que é 100% renovável e reciclável. Orientamos o descarte no lixo de papel ou lixo seco. Lembre-se de recortar e guardar as indicações de uso descritas no verso da embalagem antes de descartá-la, isso será útil para eventuais consultas.</p>
<b>Descarte do produto</b>	<p>Esse produto é composto pela capa: tecido de poliamida, poliéster e elastano; e pela bolsa gel: filme de poliamida, polietileno e gel a base d'água. Devido a dificuldade de separação das partes, orientamos o descarte no lixo seco.</p>