



**Rioquímica**

Indústria Farmacêutica | desde 1979

# Inativador para Rioscope Opa<sup>®</sup> glicina

**COMPOSIÇÃO:** Glicina 98%

**APRESENTAÇÃO:** 33 g

**CONSERVAÇÃO:** Conservar o produto em temperatura ambiente (15-30°C). Manter o produto em sua embalagem original, em local seco e ventilado, afastado da luz solar direta, fontes de calor, materiais incompatíveis, combustíveis e gases comprimidos.

**PRAZO DE VALIDADE:** 24 meses a partir da data de fabricação.

## INFORMAÇÕES GERAIS:

O **INATIVADOR PARA O PRODUTO RIOSCOPE OPA<sup>®</sup>** foi desenvolvido para tornar o descarte da solução de **RIOSCOPE OPA<sup>®</sup>** ecológica e sustentável. A mistura de **RIOSCOPE OPA<sup>®</sup>** com o aminoácido glicina torna a solução 100% biodegradável, oferecendo segurança para o manipulador e para a natureza. Esse inativador é exclusivo para o produto **RIOSCOPE OPA<sup>®</sup>**. Eficácia comprovada por meio de estudo oficial de **BIODEGRADABILIDADE IMEDIATA**.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Recomenda-se o uso de luvas e óculos de proteção para sua aplicação. Adicionar 33 gramas de Glicina (base livre) para neutralizar 5 litros da solução do produto **RIOSCOPE OPA<sup>®</sup>**. O período mínimo indicado para neutralização da solução é de 60 minutos. Elimine a solução diretamente na rede de esgoto com o auxílio de água em abundância. Verifique sempre as normativas locais para descarte de produto.

RIOQUÍMICA S/A

Fone: (17) 4009 4288

E-mail: [rioquimica@rioquimica.com.br](mailto:rioquimica@rioquimica.com.br)

[www.rioquimica.com.br](http://www.rioquimica.com.br)

CENTRAL ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDÊNCIA:  
Rua São Paulo, 30 | Vila Maceno | São José do Rio Preto - SP | CEP: 15060-035

CENTRAL INDUSTRIAL:  
Avenida Tarraf, 2600 | Jardim Anice | São José do Rio Preto - SP | CEP: 15057-441



# Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979

## **ADVERTÊNCIAS:**

**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfície aquecida. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Descaracterizar e enviar para reciclagem, caso não seja possível, descartar em aterro industrial.

## **PRIMEIROS SOCORROS:**

**EM CASO DE INGESTÃO:** Lave a boca. Beba água (dois copos no máximo). **EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo):** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água e tomar banho de chuveiro. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Enxaguar com água em abundância. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. **EM CASO DE INALAÇÃO:** Remova a pessoa para local ventilado para exposição ao ar fresco.

**ATENÇÃO: O INATIVADOR É VENDIDO SEPARADAMENTE DA SOLUÇÃO DE RIOSCOPE OPA®.**

**PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA.**

VE012019

RIOQUÍMICA S/A

Fone: (17) 4009 4288

E-mail: [rioquimica@rioquimica.com.br](mailto:rioquimica@rioquimica.com.br)

[www.rioquimica.com.br](http://www.rioquimica.com.br)

CENTRAL ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDÊNCIA:  
Rua São Paulo, 30 | Vila Maceno | São José do Rio Preto - SP | CEP: 15060-035

CENTRAL INDUSTRIAL:  
Avenida Tarraf, 2600 | Jardim Anice | São José do Rio Preto - SP | CEP: 15057-441