

KIT CIRÚRGICO OTORRINO ESTÉRIL POLAR FIX

Modelo comercial: com variações entre largura e comprimento.

Indicação de uso: Garantir a devida proteção do paciente e do profissional da saúde, minimizando transferências cruzadas de agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos. Combina conforto, maleabilidade e alta resistência ao rasgo e fricção.

Instrução de uso:

- 1- Cobertura de Mesa de Instrumentos: Posicionar no centro da mesa e abrir no sentido da largura da mesa (direita/esquerda);
- 2 - Campo Cirúrgico Otorrino: Posicionar o campo sobre a área de incisão e fixar com a fita adesiva.

Composição: Cobertura de mesa de instrumentos: Composição: Confeccionadas em filme de polietileno + reforço absorvente de viscose. Campo otorrino: Confeccionados em SMS (100% polipropileno), com reforço absorvente e impermeável (camada absorvente de polipropileno e camada impermeável de polietileno), com fita adesiva hipoalergênica (filme de polietileno transparente, revestido em ambos os lados com um adesivo de acrilato sensível e hipoalergênico).

Advertências / Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. **Produto esterilizado por óxido de etileno.**

Condições de armazenamento: Armazenar em local limpo e seco.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Anvisa nº: 8003400088

Fabricado por: Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64 - Indústria Brasileira
Responsável Técnica: Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339
Atendimento ao cliente: SAC: 0800 191099 – sac@polarfix.com.br – www.polarfix.com.br