

Título: FILME TRANSPARENTE EM ROLO CREMER ADVANCED

Ficha Técnica de Produto

Emissão: 21/08/2019

ANVISA: 80245210143

FM02000012 Revisão 00 de 09/09/2019

1. Indicação:

O Filme transparente em rolo Cremer Advanced é indicado para a fixação de curativos como cobertura secundária e proteção da pele íntegra, na prevenção de lesões devido ao atrito e à ação de agentes externos.

2. Especificação do Produto:

O Filme transparente em rolo Cremer Advanced é um curativo semipermeável e autoadesivo de poliuretano recoberto com adesivo acrílico hipoalérgico e partes destacáveis de película de poliéster e fibras de celulose.

3. Características Gerais:

Característica	Especificação do Produto (média)
Adesão à 180° (N/cm)	1,0
Espessura Total (mm)	0,04
Taxa de Transmissão de vapores (MVTR)(g/cm ² /24h)	2,0

Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios. Os testes são realizados de acordo com normas internacionalmente aceites.

Um rolo separadamente pode não representar a garantia destes valores médios, podendo ocorrer variações.

4. Foto Ilustrativa:



5. Apresentação:

Código Cremer	Descrição do Item	Unidades por cartucho	EAN-13
584363	Filme transparente em rolo Cremer Advanced 5cmx10m	01	7891800584363
584370	Filme transparente em rolo Cremer Advanced 10cmx10m	01	7891800584370
601923	Filme transparente em rolo Cremer Advanced 15cmx10m	01	7891800601923

6. Validade:

3 anos.

7. Instruções de uso:**7.1 PREPARO PARA A APLICAÇÃO**

Garantir que o local de aplicação esteja completamente limpo, seco e sem resíduos. Se necessário, efetuar tricotomia.

7.2 APLICAÇÃO

- ✓ Cortar o filme no tamanho desejado;
- ✓ Retirar o papel protetor siliconado branco, deixando exposta a superfície adesiva;
- ✓ Aplicar o filme no local desejado. Não estica-lo durante a aplicação. Para fixação, alisar o filme cuidadosamente em direção às bordas;
- ✓ Remover a grade de orientação de poliéster, identificada com número 3, certificando-se que houve total fixação.

7.3 REMOÇÃO E TROCA

- ✓ Em caso de peles sensíveis, pode-se utilizar água morna e sabão ou algodão com solução alcóolica para facilitar a remoção;
- ✓ Desprender cuidadosamente uma das extremidades do filme;
- ✓ Apoiar com firmeza uma das mãos sobre a pele com o curativo, pressionando o local suavemente. Com a outra mão, puxar a extremidade descolada na direção paralela à pele, esticando o filme lentamente e o mesmo desprenderá;
- ✓ Recomenda-se puxar o filme no sentido dos pelos;
- ✓ Em caso de descolamento por excesso de umidade, efetuar a troca do curativo.

7.4 TEMPO DE USO E FREQUÊNCIA DE TROCA

O tempo de uso e a frequência de troca dependem do protocolo padronizado na instituição, das indicações do profissional de saúde habilitado e das condições da pele do paciente.

Recomenda-se efetuar a troca em até 7 (sete) dias.

8. Contraindicações de uso

Não aplicar o produto diretamente sobre feridas e lesões. Não utilizar produto para fixação de cateteres. Este produto é contraindicado para pessoas que apresentam sensibilidade aos componentes da formulação.

9. Precauções

O fabricante recomenda uso único. Este produto é indicado somente para as finalidades previstas nas indicações de uso. Este produto deve ter a prescrição e supervisão de um profissional da saúde habilitado. Não aplicar em áreas de excesso de pelo.

Aplicar o curativo sobre a pele limpa e seca. Não tensionar o curativo durante a aplicação e não aplicar o curativo se ele estiver tensionado.

Atenção ao utilizar o produto em recém-nascidos, idosos, pacientes com a pele sensível e em pacientes que fazem o uso de corticoides por um longo período, devido ao risco de sangramento e lesões cutâneas no processo de remoção do curativo.

Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

10. Esterilização

O Filme transparente em rolo Cremer Advanced é apresentado na forma não estéril, podendo ser esterilizado pelo serviço de saúde caso necessário, por óxido de etileno ou raio gama. Para esterilizar, cortar o produto no tamanho desejado.

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774