

	Cód. Doc RT-22	Data da Revisão 24/07/2020	Revisão 1	Página 1 de 4
	<b>RELATÓRIO TÉCNICO</b> <b>CAMPO DE MESA DE MAYO INGÁMED</b>			

<b>Nº do Registro na ANVISA:</b> 80086720055
<b>Nome Técnico:</b> Campo Descartável Estéril
<b>Nome Comercial:</b> Campo Mesa de Mayo
<b>Validade do Registro na ANVISA:</b> Vigente

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricado com invólucro plástico impermeável com laminação em TNT (100% Polipropileno) na cor azul, processo SMS, gramatura média 40g/m<sup>2</sup>;
- Campo estéril, através do processo de esterilização por oxido de etileno;
- Dimensões disponíveis: 0,75 x 0,50 m, e 1,20 x 0,60 m;
- Produto de uso único;
- É destinado a proteger os instrumentos cirúrgicos de uma possível contaminação;
- Baixo desprendimento de partículas;
- Alta resistência e maleabilidade;
- Possui rigoroso controle de qualidade em todo o processo de fabricação, desde a recepção da matéria.

## INDICAÇÃO DE USO

O Campo de Mesa de Mayo age como uma barreira física para proteger os instrumentos cirúrgicos de uma possível contaminação durante a realização de um procedimento cirúrgico.


## INSTRUÇÃO DE USO

Abrir o pacote sem contaminar seu conteúdo e entregar ao auxiliar que esteja paramentado e preparado para manusear o conteúdo estéril. Vestir a mesa de Mayo, desdobrando o campo cuidadosamente. Empurre o campo sobre a mesa até cobri-la totalmente de forma asséptica. Evite movimentação excessiva para reduzir os riscos de contaminação.

Descartar após o uso.

	Cód. Doc RT-22	Data da Revisão 24/07/2020	Revisão 1	Página 2 de 4
	<b>RELATÓRIO TÉCNICO</b> <b>CAMPO DE MESA DE MAYO INGÁMED</b>			

## IMAGEM DO PRODUTO

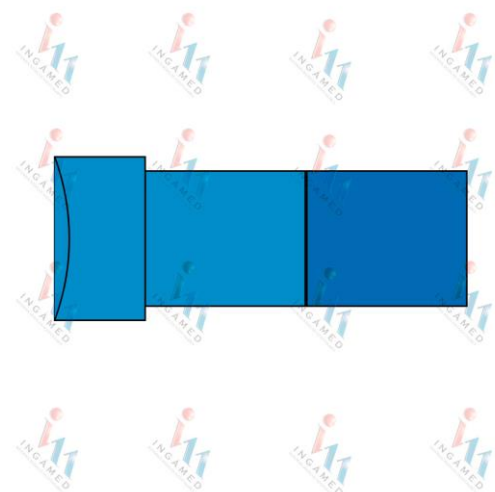

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	CAIXA
50060004	Campo Mesa de Mayo 0,75 x 0,50 m	1 unidade	30 unidades
50060003	Campo Mesa de Mayo 1,20 x 0,60 m	1 unidade	30 unidades

## FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

O produto é embalado em envelope com filme plástico e papel grau cirúrgico selado contendo 1 unidade. As embalagens individuais são acondicionadas em caixas de papelão contendo 30 unidades.

	Cód. Doc RT-22	Data da Revisão 24/07/2020	Revisão 1	Página 3 de 4
	<b>RELATÓRIO TÉCNICO</b> <b>CAMPO DE MESA DE MAYO INGÁMED</b>			

## **PRECAUÇÕES**

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida;
- Uso único;
- Proibido reprocessar, este é produto hospitalar de uso único devendo ser descartado após o uso seguindo critérios do PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde devidamente aprovado e específico do estabelecimento de saúde em que é utilizado.

## **ARMAZENAMENTO**

Armazenar a embalagem integra em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto.

## **VALIDADE DO PRODUTO**

Garantida por dois anos após a data de fabricação descrita no rotulo, desde que seguidas às instruções de armazenamento e mantendo a embalagem integra.

## **FABRICADO POR:**

***Ingá Materiais Médico Hospitalares LTDA***

Avenida Paraná, 438 – Centro – Perobal – PR

CNPJ:04.037.992/0001-82

[www.ingamed.com.br](http://www.ingamed.com.br) – Email: [vendas@ingamed.com.br](mailto:vendas@ingamed.com.br)

**Responsável Técnica:** Ana Paula Alves Guilherme – CRF/PR 31.200



Cód. Doc  
RT-22

Data da Revisão  
24/07/2020

Revisão  
1

Página  
4 de 4

**RELATÓRIO TÉCNICO  
CAMPO DE MESA DE MAYO INGÁMED**