



INSTRUÇÕES DE USO

BENGALA

NOME TÉCNICO: BENGALA

CÓDIGO DO PRODUTO: 2501171



MODELOS

BC1563-AE BENGALA FIXA MERCUR AZUL ESCURO

BC1563-GE BENGALA FIXA MERCUR GRAFITE ESCURO

BC1563-LE BENGALA FIXA MERCUR LILAS ESCURO

BC1563-MM BENGALA FIXA MERCUR MARROM MEDIO

BC1563-PR BENGALA FIXA MERCUR PRETO

Contém: 01 Peça - Parte metálica de cada peça embalada com filme plástico de polietileno autoadesivo. A rotulagem do produto consta em um tag de papel reciclado afixado ao produto.

Tamanho único ajustável

Altura do usuário: 1,5m a 2,0m

Resistência: 100 kg

IMAGEM DO PRODUTO



BC1563-AE
Azul Escuro

BC1563-GE
Grafite Escuro

BC1563-LE
Lilas Escuro

BC1563-MM
Marrom Médio

BC1563-PR
Preto

A Bengala Fixa foi desenvolvida para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando apoio e estabilidade para prevenir quedas durante a caminhada. O recurso é resistente, leve e possui apoio de mão com cantos arredondados e design ergonômico, que contribui para melhor distribuição da pressão palmar e proporciona conforto durante o uso. O dispositivo conta com 10 níveis de ajuste de altura, alça para punho e suporte para apoiar pequenos objetos. A bengala contém ponteira flexível com sinalizador de desgaste e ranhuras que reduzem o risco de deslize em pisos com acúmulo de líquido, o que oferece uma passada mais natural e segura ao caminhar.



FABRICADO POR:

MERCUR S/A.

Avenida Presidente Castelo Branco, 1260, Fundos - Distrito Industrial

CEP: 96835-666 - Santa Cruz do Sul/RS

Fone: (51) 3719-9500

contato@mercur.com.br

www.mercur.com.br

CNPJ: 93.896.397/0014-47

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Alexandre Machado Ferraz

CRQ 13100747 – 5ª Região

ANVISA nº: 81284250017

Lote nº: XXXXXX

Fab: MM/AAAA

Val: 5 anos

COMPOSIÇÃO

Parte metálica: Alumínio

Apoio de mão: Polipropileno

Ponteira: Borracha

INDICAÇÕES

O recurso é indicado para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida em casos leves de alterações de equilíbrio, lesões traumáticas, neurológicas e degenerativas, temporárias ou permanentes, prevenindo quedas

MODO DE USAR

Antes de caminhar com a bengala, é necessário realizar o ajuste de altura para uso adequado do dispositivo de apoio.

Utilize o pino mola para ajustar a altura da bengala de forma que, em postura ereta, os cotovelos fiquem posicionados entre 20 e 30 graus de flexão. Em caso de lesão, posicione a bengala ao lado oposto. Em caso de alterações de equilíbrio diversas, posicione a bengala conforme orientação do profissional da saúde, observando a capacidade física.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

O uso deste produto deve ser sempre orientado por um profissional da saúde. Certifique-se de que a ponteira de borracha está bem colocada no produto e, quando apresentar sinal de desgaste, a substitua para evitar acidentes provocados pela falta de aderência.

Verifique sempre se os pinos de ajuste de altura estão bem encaixados.



Utilize o suporte para apoiar pequenos objetos apenas em repouso, evitando caminhar com utensílios na bengala para prevenir desequilíbrios.

Quando não estiver em uso, conserve a bengala ao abrigo do calor, da luz e da umidade.

Desloque-se devagar e com cuidado nos dias de chuva, aproximando mais o recurso ao corpo para evitar risco de quedas. Com cuidado, pois é fácil perder o equilíbrio quando se está usando muletas, podendo ocorrer quedas. As muletas devem ser sempre usadas em par e não podem ser vendidas separadamente.
capa.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

Certifique-se de que a ponteira de borracha está bem colocada no produto e, quando apresentar sinal de desgaste, a substitua para evitar acidentes provocados pela falta de aderência.

MODO DE LAVAR

A bengala pode ser higienizada com álcool ou sabão neutro, com auxílio de um pano macio. Não use produtos abrasivos. Após limpa, deve ser mantida seca.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E/OU MANIPULAÇÃO DO PRODUTO

Quando não estiver em uso, conserve a bengala ao abrigo do calor, da luz e da umidade.



MODELOS

BC1564-AE BENGALA FIXA C/ APOIO MERCUR AZUL ESCURO

BC1564-GE BENGALA FIXA C/ APOIO MERCUR GRAFITE ESCURO

BC1564-LE BENGALA FIXA C/ APOIO MERCUR LILAS ESCURO

BC1564-MM BENGALA FIXA C/ APOIO MERCUR MARROM MEDIO

BC1564-PR BENGALA FIXA C/ APOIO MERCUR PRETO

Contém: 01 Peça - Parte metálica de cada peça embalada com filme plástico de polietileno autoadesivo. A rotulagem do produto consta em um tag de papel reciclado afixado ao produto.

Tamanho único ajustável

Altura do usuário: 1,5m a 2,0m

Resistência: 100 kg

IMAGEM DO PRODUTO



BC1564-AE
Azul Escuro

BC1564-GE
Grafite Escuro

BC1564-LE
Lilas Escuro

BC1564-MM
Marrom Médio

BC1564-PR
Preto

A Bengala Fixa foi desenvolvida para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando apoio e estabilidade para prevenir quedas durante a caminhada. O recurso é resistente, leve e possui apoio de mão com cantos arredondados e design ergonômico, que contribui para melhor distribuição da pressão palmar e proporciona conforto durante o uso. O dispositivo conta com 10 níveis de ajuste de altura, alça para punho e suporte para apoiar pequenos objetos. A bengala contém ponteira flexível com sinalizador de desgaste e ranhuras que reduzem o risco de deslize em pisos com acúmulo de líquido, o que oferece uma passada mais natural e segura ao caminhar.



FABRICADO POR:

MERCUR S/A.

Avenida Presidente Castelo Branco, 1260, Fundos - Distrito Industrial

CEP: 96835-666 - Santa Cruz do Sul/RS

Fone: (51) 3719-9500

contato@mercur.com.br

www.mercur.com.br

CNPJ: 93.896.397/0014-47

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Alexandre Machado Ferraz

CRQ 13100747 – 5ª Região

ANVISA nº: 81284250017

Lote nº: XXXXXX

Fab: MM/AAAA

Val: 5 anos

COMPOSIÇÃO

Parte metálica: Alumínio

Apoio de mão: Polipropileno

Ponteira: Borracha

INDICAÇÕES

O recurso é indicado para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida em casos leves de alterações de equilíbrio, lesões traumáticas, neurológicas e degenerativas, temporárias ou permanentes, prevenindo quedas

MODO DE USAR

Antes de caminhar com a bengala, é necessário realizar o ajuste de altura para uso adequado do dispositivo de apoio.

Utilize o pino mola para ajustar a altura da bengala de forma que, em postura ereta, os cotovelos fiquem posicionados entre 20 e 30 graus de flexão. Em caso de lesão, posicione a bengala ao lado oposto. Em caso de alterações de equilíbrio diversas, posicione a bengala conforme orientação do profissional da saúde, observando a capacidade física.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

O uso deste produto deve ser sempre orientado por um profissional da saúde.

Certifique-se de que a ponteira de borracha está bem colocada no produto e, quando apresentar sinal de desgaste, substitua-a para evitar acidentes provocados pela falta de aderência.

Verifique sempre se os pinos de ajuste de altura estão bem encaixados.



Utilize o suporte para apoiar pequenos objetos apenas em repouso, evitando caminhar com utensílios na bengala para prevenir desequilíbrios.

Quando não estiver em uso, conserve a bengala ao abrigo do calor, da luz e da umidade.

Desloque-se devagar e com cuidado nos dias de chuva, aproximando mais o recurso ao corpo para prevenir quedas.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

Certifique-se de que a ponteira de borracha está bem colocada no produto e, quando apresentar sinal de desgaste, a substitua para evitar acidentes provocados pela falta de aderência.

MODO DE LAVAR

A bengala pode ser higienizada com álcool ou sabão neutro, com auxílio de um pano macio. Não use produtos abrasivos. Após limpa, deve ser mantida seca.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E/OU MANIPULAÇÃO DO PRODUTO

Quando não estiver em uso, conserve a bengala ao abrigo do calor, da luz e da umidade.



MODELOS

BC1565-AE BENGALA DOBRAVEL MERCUR AZUL ESCURO

BC1565-GE BENGALA DOBRAVEL MERCUR GRAFITE ESCURO

BC1565-LE BENGALA DOBRAVEL MERCUR LILAS ESCURO

BC1565-MM BENGALA DOBRAVEL MERCUR MARROM MEDIO

BC1565-PR BENGALA DOBRAVEL MERCUR PRETO

Embalagem de papelão (papel tipo cartão) com 1 peça e bolsa de TNT (Poliéster) para transportar ou guardar o produto.

Tamanho único ajustável

Altura do usuário: 1,65m a 1,96m

Resistência: 100 kg

IMAGEM DO PRODUTO



BC1565-AE
Azul Escuro

BC1565-GE
Grafite Escuro

BC1565-LE
Lilas Escuro

BC1565-MM
Marrom Médio

BC1565-PR
Preto

A Bengala Dobrável foi desenvolvida para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando apoio e estabilidade durante a caminhada para prevenir quedas. O recurso é resistente, leve e possui apoio de mão com cantos arredondados e design ergonômico, que contribui para melhor distribuição da pressão palmar e proporciona conforto durante o uso. O dispositivo é prático, podendo ser dobrado para guardar ou transportar quando não estiver em uso e conta com 6 níveis de ajuste de altura, alça para punho e suporte para apoiar pequenos objetos. A bengala contém ponteira flexível com ranhuras que reduzem o risco de deslizamento em pisos com acúmulo de líquido e

sinalizador de desgaste, o que oferece uma passada mais natural e segura ao caminhar.

**FABRICADO POR:
MERCUR S/A.**

Avenida Presidente Castelo Branco, 1260, Fundos - Distrito Industrial
CEP: 96835-666 - Santa Cruz do Sul/RS

Fone: (51) 3719-9500

contato@mercur.com.br

www.mercur.com.br

CNPJ: 93.896.397/0014-47

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Alexandre Machado Ferraz

CRQ 13100747 – 5ª Região

ANVISA nº: 81284250017

Lote nº: XXXXXX

Fab: MM/AAAA

Val: 5 anos

COMPOSIÇÃO

Parte metálica: Alumínio

Apoio de mão: Polipropileno

Ponteira: Borracha

INDICAÇÕES

O recurso é indicado para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida em casos leves de alterações de equilíbrio, lesões traumáticas, neurológicas e degenerativas, temporárias ou permanentes, prevenindo quedas

MODO DE USAR

Antes de caminhar com a bengala, é necessário abrir e encaixar as partes do tubo. Após, ajuste a altura para uso adequado do dispositivo de apoio.

Utilize o pino mola para ajustar a altura da bengala de forma que, em postura ereta, os cotovelos fiquem posicionados entre 20 e 30 graus de flexão. Em caso de lesão, posicione a bengala ao lado oposto. Em caso de alterações de equilíbrio diversas, posicione a bengala conforme orientação do profissional da saúde, observando a capacidade física.

Acompanha bolsa para transportar ou guardar o produto.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

O uso deste produto deve ser sempre orientado por um profissional da saúde.

Certifique-se de que a ponteira de borracha está bem colocada no produto e, quando apresentar sinal de desgaste, substitua-a para evitar acidentes provocados pela falta de aderência.

Verifique sempre se os pinos de ajuste de altura estão bem encaixados.



Utilize o suporte para apoiar pequenos objetos apenas em repouso, evitando caminhar com utensílios na bengala para prevenir desequilíbrios.

Quando não estiver em uso, conserve a bengala ao abrigo do calor, da luz e da umidade.

Desloque-se devagar e com cuidado nos dias de chuva, aproximando mais o recurso ao corpo para prevenir quedas.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

Certifique-se de que a ponteira de borracha está bem colocada no produto e, quando apresentar sinal de desgaste, a substitua para evitar acidentes provocados pela falta de aderência.

MODO DE LAVAR

A bengala pode ser higienizada com álcool ou sabão neutro, com auxílio de um pano macio. Não use produtos abrasivos. Após limpa, deve ser mantida seca.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E/OU MANIPULAÇÃO DO PRODUTO

Quando não estiver em uso, conserve a bengala ao abrigo do calor, da luz e da umidade.



MODELOS

BC1566-AE BENGALA 4 PONTAS C/ APOIO MERCUR AZUL ESCURO
BC1566-GE BENGALA 4 PONTAS C/ APOIO MERCUR GRAFITE ESCURO
BC1566-LE BENGALA 4 PONTAS C/ APOIO MERCUR LILAS ESCURO
BC1566-MM BENGALA 4 PONTAS C/ APOIO MERCUR MARROM MEDIO
BC1566-PR BENGALA 4 PONTAS C/ APOIO MERCUR PRETO

Contem: 01 Peça - Parte metálica de cada peça embalada com filme plástico de polietileno autoadesivo

A rotulagem do produto consta em um tag de papel reciclado afixado ao produto.

Tamanho único ajustável

Altura do usuário: 1,50m a 2,0m

Resistência: 100 kg

IMAGEM DO PRODUTO



BC1566-AE
Azul Escuro

BC1566-GE
Grafite Escuro

BC1566-LE
Lilas Escuro

BC1566-MM
Marrom Médio

BC1566-PR
Preto

A Bengala 4 Pontas com Apoio foi desenvolvida para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando apoio e estabilidade durante a caminhada para prevenir quedas. O recurso é resistente, leve e possui apoio de mão com cantos arredondados e design ergonômico, que contribui para melhor distribuição da pressão palmar e proporciona conforto durante o uso. O dispositivo conta com 10 níveis de ajuste de altura, alça para punho e suporte para apoiar pequenos objetos. A bengala contém base de apoio ampliada, com 4 ponteiros flexíveis que oferecem melhor aderência ao solo, gerando estabilidade e segurança ao caminhar.



FABRICADO POR:

MERCUR S/A.

Avenida Presidente Castelo Branco, 1260, Fundos - Distrito Industrial

CEP: 96835-666 - Santa Cruz do Sul/RS

Fone: (51) 3719-9500

contato@mercur.com.br

www.mercur.com.br

CNPJ: 93.896.397/0014-47

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Alexandre Machado Ferraz

CRQ 13100747 – 5ª Região

ANVISA nº: 81284250017

Lote nº: XXXXXX

Fab: MM/AAAA

Val: 5 anos

COMPOSIÇÃO

Parte metálica: Alumínio

Base: Polipropileno

Apoios de mão: Polipropileno

Ponteira: Borracha

INDICAÇÕES

O recurso é indicado para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida em casos leves de alterações de equilíbrio, lesões traumáticas, neurológicas e degenerativas, temporárias ou permanentes, prevenindo quedas

MODO DE USAR

Antes de caminhar com a bengala, é necessário observar a orientação de posicionamento indicada no produto pela frase “Este lado próximo ao corpo”. Para alterar o lado de uso, pressione o pino de ajuste e gire a base de 4 pontas até encaixar o pino novamente. Após, ajuste a altura para uso adequado do dispositivo de apoio.

Utilize o pino mola para ajustar a altura da bengala de forma que, em postura ereta, os cotovelos fiquem posicionados entre 20 e 30 graus de flexão. Em caso de lesão, posicione a bengala ao lado oposto. Em caso de alterações de equilíbrio diversas, posicione a bengala conforme orientação do profissional da saúde, observando a capacidade física.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

O uso deste produto deve ser sempre orientado por um profissional da saúde. Certifique-se de que a ponteira de borracha está bem colocada no produto e, quando apresentar sinal de desgaste, a substitua para evitar acidentes provocados pela falta de aderência.

Verifique sempre se as partes do tubo e os pinos de ajuste de altura estão bem encaixados, bem como a posição adequada, orientada pela frase na base “Este lado próximo ao corpo”.

Utilize o suporte para apoiar pequenos objetos apenas em repouso, evitando caminhar com utensílios na bengala para prevenir desequilíbrios.

Quando não estiver em uso, conserve a bengala ao abrigo do calor, da luz e da umidade.

Desloque-se devagar e com cuidado nos dias de chuva, aproximando mais o recurso ao corpo para evitar risco de quedas.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

Certifique-se de que a ponteira de borracha está bem colocada no produto e, quando apresentar sinal de desgaste, a substitua para evitar acidentes provocados pela falta de aderência.

MODO DE LAVAR

A bengala pode ser higienizada com álcool ou sabão neutro, com auxílio de um pano macio. Não use produtos abrasivos. Após limpa, deve ser mantida seca.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E/OU MANIPULAÇÃO DO PRODUTO

Quando não estiver em uso, conserve a bengala ao abrigo do calor, da luz e da umidade.

