



OPTIGERM PPT

DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Para aumentar a adesão de uso dos profissionais aos protocolos de limpeza e desinfecção precisamos de uma solução que ofereça segurança e praticidade, requisitos que só a marca OPTIGERM® pode oferecer.



Ação em bactérias multirresistentes



Produto concentrado com sistema fácil

30 DIAS

Efeito residual de 30 dias



DESCRIÇÃO

Produto concentrado, ideal para superfícies que consomem grande volume de produto. Possui diluição única com um sistema fechado, garantindo segurança na dosagem e praticidade durante o processo de diluição, limpeza e desinfecção através de uma válvula diluidora acoplada.

ATRIBUTOS



Limpa e desinfeta em uma única operação



Mistura sinérgica de quaternário amônio de 5ª geração e biguanida



Proporciona alto rendimento;



Diluição única garantindo praticidade e segurança



Alto poder de limpeza com ação contra o Biofilme



Tempo de contato de 10min



Possui versão com válvula diluidora



Validade da solução pronta para uso de 30 dias

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Recomendado para instituições que ofereçam assistência à saúde: hospitais, clínicas, veículos de resgate médicos, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios, empresas limpadoras da área da saúde




SUPERFÍCIE

Indicado para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, portas, divisórias, teto e demais superfícies fixas. Também pode ser usado em artigos não críticos, sempre observando o tempo de contato de 10 minutos.

DILUIÇÃO

APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRADO PARA 1L DE ÁGUA	RENDIMENTO
	PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
LIMPEZA E DESINFECÇÃO	1	99	100lts	1%	10ml	100lts

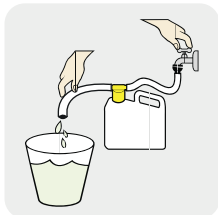

Para garantir a diluição segura é importante verificar a pressão de água recomendada entre 200 a 700 litros/hora para não comprometer a eficácia e o efeito biocida do produto. O sistema funciona com variação de precisão de +/- 10% na taxa de dosagem.

MODO DE USAR



Para artigos não críticos

Aplicar o OPTIGERM® PPT diluído no pano e em seguida espalhe pelo artigo desejado. Enxágue se necessário. Aguarde a secagem, respeitando o tempo de ação de 10min



Para limpeza de piso, parede e teto

Aplicar a solução de OPTIGERM® PPT diluída diretamente na superfície ou através de aplicador por pressão JET 2000®, mop ou outra ferramenta apropriada. Garantir que toda superfície esteja úmida. Esfregar a superfície, remover a sujidade e em seguida retirar o excesso de produto. Enxágue se necessário. Aguardar a secagem respeitando o tempo de ação de 10min.

USO DE EPI



LUVAS



ÓCULOS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Azul
Densidade a 20/40°C	0,990/1,020
pH do produto puro	9,00/10,50
ph do produto diluído 1:100	8,00/9,50

COMPOSIÇÃO

- ✓ Polihexametileno biguanida (PHMB): 1.600 ppm
- ✓ Quaternário de amônio 5ª Geração: 2.400 ppm
- ✓ Agentes de limpeza, ação contra biofilme e outros ingredientes: q.s.p. 100%

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixas com 2 frascos de 2 litros*
- ✓ Caixas com 4 bombonas de 5 litros

*Conjunto conector fornecido separadamente.

VALIDADE

24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo
Após abertura: 24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo ou em quanto os panos estiverem úmidos.

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Registro ANVISA/MS	3.1003.0111
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consultar um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Centro de Intoxicações - Tel.: 0800 771 3733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

