

Título:	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL PROCITEX		
Ficha Técnica de Produto	Emissão: 07/08/2019	ANVISA: 80245219058	

FM02000012 Revisão 00 de 09/09/2019

1. Indicação:

O Esparadrapo Impermeável Procitex é indicado para fixação de curativos, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, etc.

Possui um alto desempenho em fixação sendo muito resistente. É flexível e impermeável.

2. Especificação do Produto:

O Esparadrapo Impermeável Procitex é composto de tecido 100% algodão tratado para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos. É comercializado enrolado em carretéis plásticos com abas e capa protetora, que mantém a integridade do produto. Está disponível na cor branca e na forma não estéril.

3. Características Gerais:

Característica	Especificação do Produto
Adesão à placa de inox (N/cm)	3,0
Espessura Total (mm)	0,28
Força de Desenrolamento (N/cm)	2,0
Tack (cm)	< 40

Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios. Os testes são realizados de acordo com normas internacionalmente aceitas.

Um rolo separadamente pode não representar a garantia destes valores médios, podendo ocorrer variações.

4. Foto Ilustrativa:



5. Apresentação

Código Cremer	Descrição do Item	Unidades por Caixa	EAN-13
257199	ESPARADRAPO PROCITEX 10cmX4,5m IMPERMEAVEL CX 72UN	72	7891800204667
663006	ESPARADRAPO PROCITEX 10cmX4,5m IMPERMEAVEL CX 36 UN	36	17891800663003
257212	ESPARADRAPO PROCITEX 5cmX4,5cm IMPERMEAVEL CX 144UN	144	7891800204650

6. Validade:

2 anos.

7. Instruções de uso:

- ✓ Escolha o tamanho do esparadrapo de sua preferência;
- ✓ Lave e seque bem as mãos antes de manipular o curativo;
- ✓ Limpe e seque a pele em volta do ferimento;
- ✓ Corte o esparadrapo de acordo com a necessidade;
- ✓ Aplique o esparadrapo no local desejado;
- ✓ Não aplique diretamente sobre a pele lesionada ou sobre ferimentos;
- ✓ Recomenda-se não aplicar diretamente sobre a pele, devido à alta fixação.

8. Contraindicações de uso

Recomenda-se não utilizar em pessoas com pele sensível, devido à alta fixação.

Este produto é contraindicado para pessoas que apresentam sensibilidade aos componentes da formulação.

Pessoas que possuem alergia e/ou sensibilidade ao látex devem evitar o uso.

9. Precauções

Se necessário, use apenas vaselina para a remoção, não use outros solventes.

Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

CONTÉM LÁTEX NATURAL.

PODE CAUSAR ALERGIA.

PROIBIDO REPROCESSAR.

10. Esterilização

O Esparadrapo Impermeável Procitex é apresentado na forma não estéril, podendo ser esterilizado pelo serviço de saúde, caso necessário, por óxido de etileno ou raio gama. Para esterilizar, cortar o produto no tamanho desejado e aplicá-lo em superfície de aço inox ou papel siliconado.

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774