

CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPO-ALÉRGICO

Cadastro / Registro M.S.:

10426950002

Modelos

Bege e Infantil

Indicação de uso

Bandagem adesiva hipoalérgica para uso após coleta de sangue, aplicação de injeções e/ou vacinas. Devido a sua composição garante proteção com excelente porosidade, não causa irritação e evita maceração da pele no local em que foi aplicada, e mesmo com uso por tempo prolongado, proporciona conforto para o paciente.

Especificação técnica

Fita microporosa;

Disco absorvente redondo de não tecido Spuntec e polietileno siliconado;

Possui alta capacidade de absorção exerce a compressão necessária, auxiliando no processo de hemostasia;

Livre de solvente e látex;

Formato redondo (micropore): 2,0cm

Caixa com abertura lateral para retirada da bandagem, sem contato com as demais que ficam protegidas dentro da embalagem;

Modelos:

Bege

Kids - ilustrações infantis

Validade: 2 anos

Uso único e descartável.

Apresentação

Embalagem Primária: Caixa contendo 500 unidades de bandagem.

Embalagem Secundária: 50 caixas com 500 unidades de bandagem cada.

Orientações de Uso

A hemostasia inicia-se após o rompimento do vaso, quando as plaquetas, células sanguíneas responsáveis pelo início do fenômeno de coagulação, encontram uma superfície rugosa e liberam a tromboplastina. Em seguida desencadeia-se a coagulação, sendo envolvidos treze fatores, culminando na formação do coágulo de fibrina (trombo).

O tempo de sangramento segundo o método de YVY é de 3 a 8 minutos, isto é o tempo normal para a regeneração de um pequeno vaso venoso e, o tempo de 5 a 10 minutos para que ocorra a formação do coágulo de fibrina.

1. Puxe a fita e retire um curativo por vez.
2. Não corte a fita após a retirada do curativo, evitando que a fita volte para dentro.
3. Para a fixação da embalagem retire a película da base e fixe em uma superfície plana.
4. Segue-se o procedimento padrão pós punção vascular e/ou aplicação de injeções e vacinas, ou seja, faz-se uma compressão no local puncionado com algodão seco por 1 a 2 minutos, e posteriormente, sem friccionar para não retirar o trombo formado, aplica-se a bandagem de forma centralizada.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”;

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não utilizar caso a embalagem esteja violada. Em caso de irritação, descontinuar o uso.

Armazenamento e Transporte

As condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

ISO 13485:2003

RDC 40/2015

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

Códigos de Barra

EAN13

7898652377877 - Kids

7898652377860 - Bege

EAN14

17898652377874

17898652377867

Importado e Distribuído por:

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

Responsabilidade Técnica

Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR Nº 25368

Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@medixbrasil.com.br

0800 006 3036

Revisão 02 de 21/03/2024

Imagens meramente ilustrativas:

