

MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

Protetores de gel puro

(As informações aqui apresentadas são de caráter declaratório, podendo o texto final, ter formatação diferente).

Descrição:

Desenhado para absorver o impacto de grau médio produzido no andar, ideal para substituir a palmilha no interior de qualquer calçado. Reduz a pressão sobre a zona do metatarso e no calcanhar. Recomendado para adaptar-se ao calçado. As palmilhas com Ogiva além de possuir as mesmas indicações mencionadas possui a finalidade de suavizar a forte pressão na área.

Indicações:

Dores no calcanhar em geral, prática de esportes (especialmente em pisos duros) e Metatarsalgias em geral.

Princípio de Funcionamento:

Os Protetores de Gel puro, absorve parte do impacto da caminhada protegendo as articulações. Mantém a pele que está em contato hidratada e lubrificada. A ogiva suaviza a forte pressão na área.

Modo de Uso:

Coloque os protetores de Gel puro com cuidado para que se encaixe perfeitamente, evitando o deslocamento.

Cuidados:

Lave regularmente. Poeira e areia que se acumulam no sapato podem corroer o material. Lavar com água e sabão neutro. Secar e polvilhar com talco para facilitar o calçado.

Precauções:

NÃO ESTERIL. Não usar em feridas abertas ou em casos da embalagem estiver aberta o uso danificado.

VENOSAN BRASIL LTDA
Av. Governador Nilo Coelho, 360,
Distrito Industrial, Abreu e Lima - PE,
Brasil CEP: 53520-810
Tel: + 55 81 3538-8900
venosan@venosan.com.br
www.venosan.com.br



Armazenamento e Transporte:

Armazenar em ambiente fresco. Manter na embalagem original até sua utilização.

Composição:

45% Polímeros.

55% Vaselina farmacêutica.

Prazo de validade:

5 anos a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA nº 1034931004.

Responsável Técnica: Raíssa da Silva Lins – CRF/PE 05113.

Fabricado por:

Dr Lenos S.A.

Rio Limay 1527/31 – Buenos Aires – Argentina.

Importado e Distribuído por:

Venosan Brasil Ltda.

Av. Governador Nilo Coelho, 360,

Distrito Industrial, Abreu e Lima – BRASIL.

CEP: 53520-810.