

Sonda Retal

DESCRIÇÃO, INDICAÇÃO OU FINALIDADE DO PRODUTO

A sonda Retal é um artigo médico **estéril**, siliconizado e de uso único, indicado para introduzir água ou solução laxativa no intestino.

A sonda Retal é uma sonda de alívio, a permanência é transitória não podendo permanecer mais do que 6 horas no paciente.

O produto tem como finalidade aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso. Utilizável também para retirar conteúdo fecal através do reto.

Validade:

36 MESES



Registro M.S.: 8.02860.0.9008

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Apresenta-se como um tubo de PVC 400 mm siliconizado, flexível, com uma das extremidades com modelo aberta com apenas um (1) orifício na lateral. A ponta da Sonda deve estar isenta de rebarba. Na outra extremidade (distal) apresenta um conector com ou sem tampa (Na sonda com perfusor, ao invés do conector temos um perfusor).

Apresenta variações de diâmetro conforme o calibre da sonda. A sonda retal é comercializada nos modelos do n° 04 ao 32

Sonda de alívio embalada em embalagem individual, asséptica que apresenta em um dos lados papel grau cirúrgico e do outro filme em polietileno/polipropileno, vedado pôr termo-selagem.

Componentes:

- Conector Luer;
- Tubo De PVC (Cor: Cristal);
- Perfusor;

Detalhes sobre o tubo:

Orifícios Laterais:

Um Orifício

Formato da Ponta:

Aberta

Tamanhos (calibres):

Comprimento: 40 cm

04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
com perfusor

TUBO DE PVC	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Comprimento (cm)	40														
Diâmetro externo (mm)	1,65	2,25	2,85	3,25	3,9	4,65	5,2	5,9	6,4	7,0	7,6	8,0	9,0	9,5	10,5
Diâmetro interno (mm)	0,9	1,2	1,5	2,0	2,6	3,3	3,6	4,0	4,5	5,0	5,3	6,0	6,7	7,0	7,5
Tolerância (mm)	± 0,15			± 0,20				0,25		± 0,30					

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

Perfusor:



Confeccionado em composto ABS Terulan GP35 rígido. Possui a finalidade de perfurar o frasco/bolsa de soro e manter o sistema fechado.

*As descrições detalhadas referentes ao **Tubo de PVC**, **Conector Luer Slip** e **Modelos de Embalagens** podem ser encontradas no **anexo 1**.

MODO DE USO

1. O procedimento deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;
2. Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
3. Conectar a sonda Retal na sua borracha
4. Colocar a solução laxativa dentro do irrigador;
5. Retirar o ar da borracha.
6. Lubrificar a sonda retal.
7. Introduzir a sonda conforme técnica médica;
8. Escoar lentamente o líquido até restar pequena quantidade no irrigador e em seguida clampar o irrigador.
9. Orientar o paciente a reter a solução o quanto puder;
10. Oferecer comadre a mão e realizar higiene.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE O USO DO PRODUTO

1. O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.
2. Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinado na técnica própria à ser utilizada.
3. Deve assegurar a compatibilidade de uso com seringas e irrigador.
4. A conexão entre o tubo de PVC e os conectores deve suportar as condições normais de uso do produto.
5. O produto deve ser armazenado em local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem.
6. Evitar a aplicação do produto em condutos que estejam irritados e/ou inflamados. Uso em alguns casos, da aplicação de lubrificante na sonda para diminuir o traumatismo quando de sua aplicação.

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

1. Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

LISTA DE CÓDIGOS DE BARRAS

SONDA RETAL	
SONDA RETAL 04	789845197 012 5
SONDA RETAL 06	789845197 013 2
SONDA RETAL 08	789845197 014 9
SONDA RETAL 10	789845197 015 6
SONDA RETAL 12	789845197 016 3
SONDA RETAL 14	789845197 017 0
SONDA RETAL 16	789845197 018 7
SONDA RETAL 18	789845197 019 4
SONDA RETAL 20	789845197 020 0
SONDA RETAL 22	789845197 021 7
SONDA RETAL 24	789845197 022 4
SONDA RETAL 26	789845197 023 1
SONDA RETAL 28	789845197 024 8
SONDA RETAL 30	789845197 025 5
SONDA RETAL 32	789845197 026 2
SONDA RETAL 18 COM KIT PERFUSOR	789845197 145 0
SONDA RETAL 20 COM KIT PERFUSOR	789845197 146 7
SONDA RETAL 22 COM KIT PERFUSOR	789845197 147 4
SONDA RETAL 24 COM KIT PERFUSOR	789845197 148 1
SONDA RETAL 26 COM KIT PERFUSOR	789845197 149 8