



OPTICLEAN

DETERGENTE NEUTRO PARA USO HOSPITALAR

Opticlean é um detergente neutro que contém ativos tensoativos cuidadosamente formulados para remover com facilidade a sujidade de origem lipídica e proteica comum em ambientes que oferecem assistência à saúde.



Produto pronto uso e pode ser utilizado na proporção até 1:50



Alta performance na remoção de gorduras e proteínas



Compatível com diversos artigos e superfícies



Notificado na ANVISA



DESCRIÇÃO

Opticlean é um detergente neutro especialmente desenvolvido para limpeza de artigos, utensílios e demais superfícies laváveis em instituições que ofereçam assistência à saúde.

ATRIBUTOS



Alto rendimento



Indicado para pré limpeza de instrumentais cirúrgicos



Testado dermatologicamente



Pode ser utilizado para limpeza direta de superfícies e artigos laváveis

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Recomendado para instituições que ofereçam assistência à saúde: hospitais, clínicas, veículos de resgate médicos, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios [...]



SUPERFÍCIE

Ideal para limpeza ou pré-limpeza de instrumental cirúrgico e artigos médicos de forma geral, móveis e demais itens laváveis.

DILUIÇÃO

APLICAÇÃO	PROPORÇÃO		TOTAL DE SOLUÇÃO PRONTO USO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE PRODUTO CONCENTRANDO PARA 1L DE SOLUÇÃO	RENDIMENTO
	PARTES DE PRODUTO	PARTES DE ÁGUA				
PURO	1	0	1lts	100%	1lt	1lt
1:50	1	49	50lts	2%	20ml	50lts

MODO DE USAR



Para limpeza direta de superfícies e artigos laváveis

1. Aplicar o produto diretamente sobre a superfície ou sob uma esponja/fibra não abrasiva.
2. Se a sujidade estiver impregnada, aguarde alguns minutos, até que a sujidade se desprenda.
3. Esfregue delicadamente, se necessário.
4. Em seguida, enxaguar com água corrente.



Limpeza com o produto diluído na proporção de 1:50

1. Deixar os artigos e utensílios imersos por alguns minutos na solução do produto diluído em água.
2. Enxaguar em seguida e proceder com o processo de limpeza.
3. Descarte a solução após o uso.

Importante ressaltar que Opticlean não é indicado para uso em lavadoras automáticas, apenas limpeza manual.

USO DE EPIs



LUVAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Incolor
Odor	Inodoro
Densidade 20/4°C (g/cm ³)	1,000 a 1,025
pH do produto puro	6,00 a 8,00
Viscosidade a 25°C (cSt)	200 a 500

COMPOSIÇÃO

- ✓ Dodecilbenzeno sulfonato de sódio
- ✓ Lauriléter sulfato de sódio
- ✓ Amida de coco
- ✓ Sulfato de magnésio
- ✓ Trietanolamina
- ✓ Corante
- ✓ Isotiazolinonas
- ✓ Água

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixas com 12 frascos de 1 litro
- ✓ Caixas com 4 bombonas de 5 litros

VALIDADE

EM EMBALAGEM ORIGINAL
24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo.

QUANDO DILUÍDA, DESCARTAR APÓS O USO.

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Notificação ANVISA/MS	25351174079/2017-10
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consultar um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Centro de Intoxicações - Tel.: 0800 771 3733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

