



FICHA TÉCNICA / PROSPECTO


# EXTENÇÃO CLINMED

MATERIAIS HOSPITALARES

---



## EXTENSÃO HOSPITALAR CLINMED

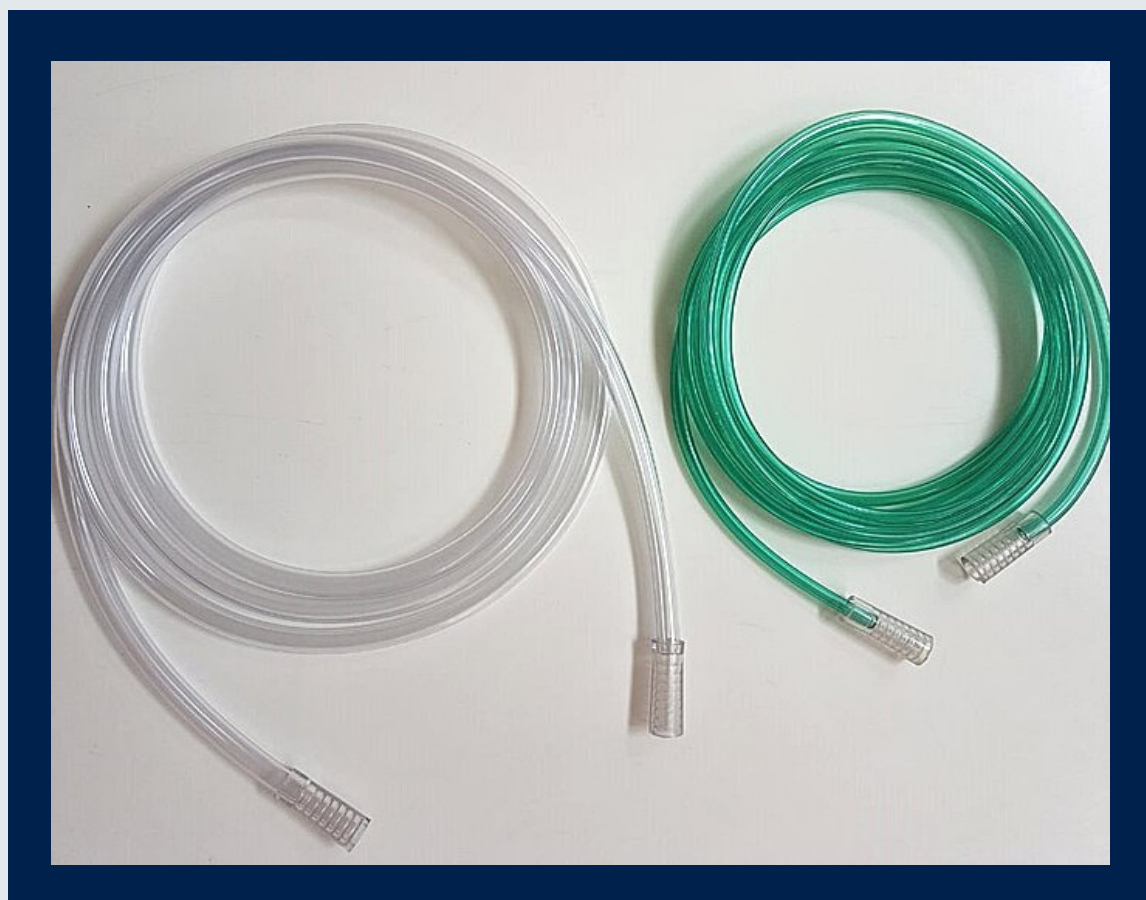

Extensão Hospitalar Clinmed (PVC Cristal para Aspiração com Conector Graduado nas extremidades)

Dimensões - (ø ext. x ø int.) (mm): 6,8 x 4,5 8 x 4 8 x 6 10 x 6 12 x 6 (outras dimensões sob consulta)

Tamanhos (m): 1,50 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 15,00.(outras dimensões sob consulta)

Extensão Hospitalar Clinmed (PVC Verde Translúcido para Oxigenoterapia com Conector Graduado nas extremidades)

Dimensões - (ø ext. x ø int.) (mm): 5 x 3 - 5,5 x 3 - 6,5 x 4,5 - 6,8 x 4,5 (outras dimensões sob consulta)

Tamanhos: (m): 1,00 - 1,50 - 2,00 3,00 (outras dimensões sob consulta)



Extensão Hospitalar Clinmed (PVC Fosco para Aspiração sem Conector)

Dimensões (ø ext. x ø int.) (mm):12,0 x 9,0 (outras dimensões sob medida)

Tamanhos (m): 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 15,00.




## EXTENSÃO HOSPITALAR CLINMED

- Indicação: Utilizada como meio de transporte (condução) das secreções corpóreas, líquidos, fluidos, soluções e gases no procedimento de Aspiração à Vácuo, Infusão ou Oxigenoterapia.
- Componentes :- Conector de PVC Graduado; Conector de Elastômero; Conector Luer Lock Macho e Fêmea; Extensão de PVC (Cristal, Verde Translúcido ou Fosco) de vários tamanhos e dimensões.

### **PRODUTO ISENTO DE LATEX**

- Apresentação:
  1. Embalagem Primária: Envelope de Papel Grau Cirúrgico com abertura asséptica contendo 01 unidade;
  2. Embalagem Secundária: Caixa de Papelão para transporte contendo quantidades variadas a critério do mercado.
- Instrução de Uso: 1 - Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica; 2 - Examinar o produto antes de utilizá-lo; 3 - Proceder às conexões, certificando-se de que estão bem fixas. As conexões são feitas entre linhas de vácuo, infusão ou oxigênio e os dispositivos médicos a serem utilizados.
- Cuidados Especiais: Utilizar técnica asséptica; O produto deverá ser utilizado por profissionais qualificados; Verificar cuidadosamente o estado da embalagem; Certificar-se que a embalagem não esteja rasgada, molhada ou aberta; Verificar a validade do produto; Armazenar o produto em local limpo, seco, à temperatura ambiente e ao abrigo do sol.
- Esterilização: Esterilizado com Gás de Etileno (E T O), com validade para 3 anos
- Rótulos, Etiquetas e instruções de uso, conforme RDC 185/01. PRODUTO LIVRE DE LATEX
- Produto Médico-Hospitalar / Descartável / De uso único / Estéril

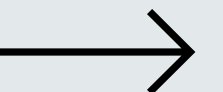

# AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA



## TELEFONE

(19) 3805-4600

## CELULAR

(19) 99354-2717 – Fernanda Torres

(19) 99355-7252 – Fabíola Fritoli

## E-MAIL

[vendas1@clinmed.ind.br](mailto:vendas1@clinmed.ind.br)

[vendas@clinmed.ind.br](mailto:vendas@clinmed.ind.br)

## WEBSITE

[www.clinmed.ind.br](http://www.clinmed.ind.br)