

BOCAL DESCARTÁVEL CLASS.BECKER

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

O bocal de papelão é um produto resistente, fabricado com material que não apresenta deformação durante a utilização no procedimento.

Papel semi-Kraft branco específico para uso oral e cola atóxica sem adição de produtos químicos.

Possui na sua face externa um revestimento plástico que evita uma possível aderência aos lábios do paciente durante o exame.

Unidades embaladas individualmente com BOPP (polipropileno biorientado)

APRESENTAÇÃO:

Pacotes com 50 unidades

CÓDIGOS	DESCRIPTIVOS
BT 20	Bocal 65mmx20mmx22mm
BT 23	Bocal 65mmx23mmx25mm
BT 24	Bocal 65mmx24mmx26mm
BT 25	Bocal 65mmx25mmx27mm
BT 28	Bocal 65mmx28mmx30mm
BT 30	Bocal 65mmx30mmx32mm

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Retirar o produto da embalagem.
2. Conectar o produto ao filtro bactericida do aparelho.
3. Realizar o procedimento de espirometria.
4. Descartar após o uso.

PRECAUÇÕES:

Produto de uso único, não reutilizar.

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra.

O produto não causa efeitos colaterais, de acordo com a finalidade de uso.

Armazenar protegido da luz e de produtos inflamáveis.

Realizar o armazenamento em local seco, arejado e limpo.

Abri a embalagem somente no momento da utilização.

A fim de fornecer segurança e higiene e não permitir o contato do paciente com o aparelho e com o filtro durante a execução do exame, deve ser conectado ao filtro bacteriológico do espirômetro

ADVERTÊNCIAS:

A escolha quanto ao tamanho do tubete deve ser feita por profissional qualificado. Produto não estéril e descartável.