

BOWIE & DICK CLEAN TEST – PACOTE PRONTO

REF: 832

Indicador químico pacote pronto (ISO 11140-1:2014, Tipo 2 ISO 11140-4:2007) para monitoramento diário do sistema de pré-vácuo em esterilizadores a vapor com bomba de vácuo. Indicado para detectar a presença de ar residual, gases não condensáveis, vazamentos na câmara, avaliar a penetração de vapor e detectar falhas no funcionamento da bomba de vácuo.

Parâmetros Críticos de Processo

Temperatura: 121° C Temperatura: 134° C
 Tempo: 15 minutos Tempo: 3,5 minutos

Instruções de Uso: Não abra o pacote antes de ser utilizado em um processo de esterilização, esta embalagem faz parte do desempenho do pacote teste Bowie & Dick. Após realizar um ciclo de pré-aquecimento, coloque o pacote teste Bowie & Dick CLEAN TEST na bandeja mais baixa sobre o dreno. Executar um ciclo de esterilização para Bowie & Dick conforme parâmetros informados acima. Após o final do ciclo, retire o pacote do esterilizador, remova a folha de teste da embalagem e examine o resultado. O resultado aceitável deve ser um marrom escuro (Cocoa) uniforme. Confira o gabarito neste documento para interpretação dos resultados.

Livre de Chumbo.

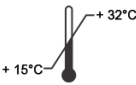



Composição: Pacote desafio + 56 folhas (Equivale ao teste de 7kg do Bowie & Dick) + 1 folha Bowie Dick interna + Indicador de passagem externo.

Medidas: 103mm x 88mm x 18mm

Fabricante: Clean-Up Brazil Biotecnologia Ltda - CNPJ 05.161.206/0001-17.

Responsável Técnico: Daniel Davi Gruchinski. CRQ IX 09203188

Armazenagem

	Temperatura: 15 °C a 32 °C.		Umidade relativa: 30 % a 70 %.
	Mantenha em local seco, sem condensação.		Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Isento de registro/cadastro conforme instrução normativa nº 2 de 31 de maio de 2011.

GABARITO

CLEAN TEST TESTE BOWIE & DICK (STEAM/VAPOR) LOT: CLBD0000 EXP: DD/MM/AAAA



EQUIP.: _____ OPERADOR: _____
 CICLO: _____ SUPERVISOR: _____
 LOCAL: _____ DEPTO: _____

NÃO PROCESSADO

Cor original.

CLEAN TEST TESTE BOWIE & DICK (STEAM/VAPOR) LOT: CLBD0000 EXP: DD/MM/AAAA



EQUIP.: _____ OPERADOR: _____
 CICLO: _____ SUPERVISOR: _____
 LOCAL: _____ DEPTO: _____

PROCESSADO

Resultado reprovado. Penetração insuficiente de vapor.

CLEAN TEST TESTE BOWIE & DICK (STEAM/VAPOR) LOT: CLBD0000 EXP: DD/MM/AAAA



EQUIP.: _____ OPERADOR: _____
 CICLO: _____ SUPERVISOR: _____
 LOCAL: _____ DEPTO: _____

PROCESSADO

Resultado reprovado. Presença de gases não condensáveis, ou bolha de ar.

CLEAN TEST TESTE BOWIE & DICK (STEAM/VAPOR) LOT: CLBD0000 EXP: DD/MM/AAAA



EQUIP.: _____ OPERADOR: _____
 CICLO: _____ SUPERVISOR: _____
 LOCAL: _____ DEPTO: _____

PROCESSADO

Resultado reprovado. Presença de vapor superaquecido, a cor muda para cinza indicando temperatura excessiva ou exposição prolongada.

CLEAN TEST TESTE BOWIE & DICK (STEAM/VAPOR) LOT: CLBD0000 EXP: DD/MM/AAAA



EQUIP.: _____ OPERADOR: _____
 CICLO: _____ SUPERVISOR: _____
 LOCAL: _____ DEPTO: _____

PROCESSADO

Resultado aprovado.