

VIC GLUTARAL CLEAR

Código: FT 055

Revisão: 01

Emissão: Setembro/2019

DESCRIÇÃO

O VIC GLUTARAL CLEAR[®] tem como princípio ativo o glutaraldeído em uma solução à 2,2%. É um desinfetante de alto nível de instrumentos odonto-médico-hospitalares: endoscópios, instrumentos odontológicos, equipamentos de borracha ou plástico, entre outros que não podem ser submetidos ao calor.

INDICAÇÕES

O VIC GLUTARAL CLEAR[®] é um produto “Pronto Uso” indicado para desinfecção de artigos semicríticos.

ADVERTÊNCIAS

CORROSIVO! CÁUSTICO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES EM CONTATO COM OLHOS, PELE E MUCOSAS. CUIDADO! IRRITANTE PARA OLHOS, PELE E MUCOSAS. PERIGO! CAUSA DANOS SE INGERIDO. PERIGO! Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Não misturar com outros produtos. Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. “Água: pode faltar. Não desperdice.”

INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUÇÕES DE ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize luva e óculos de proteção.

Vic Glutaral Clear[®] é um produto “Pronto Uso”, não deve ser diluído em água. Não misturar com outros produtos. Os instrumentos e materiais médicos ou hospitalares devem estar limpos e secos antes de entrar em contato com o Vic Glutaral Clear[®].

DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL: lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los no produto puro deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar com água estéril ou filtrada e na sequência secar.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

VIC GLUTARAL CLEAR

Código: FT 055

Revisão: 01

Emissão: Setembro/2019

Vic Glutaral Clear[®] possui uma fita indicativa de teor, o **Vic Glutaral Test[®]** que mede a concentração de glutaraldeído no uso de banho por imersão. A concentração de glutaraldeído não pode estar abaixo de 2%, caso isso ocorra, a solução deve ser trocada imediatamente. As cubas utilizadas para a imersão devem estar sempre limpas, e a desinfecção delas deverá ser feita antes do uso. Durante o período de uso da solução, caso apareça resíduos ou matéria orgânica depositados no fundo das cubas, a solução deve ser imediatamente descartada. O Vic Glutaral Clear[®] possui o tempo de uso de solução de até no máximo 30 (trinta) dias.

APRESENTAÇÕES

5000 ml – Caixa contendo 2 galões.

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. ”

“PROIBIDO A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ”

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

“PERIGO! Provoca lesões oculares graves. ”

TELEFONE DE EMERGÊNCIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CEATOX - 0800-148110.

“CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. ”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA. ”

PRIMEIROS SOCORROS

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para um local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Tratamento específico. Contém GLUTARALDEÍDO.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

VIC GLUTARAL CLEAR

Código: FT 055

Revisão: 01

Emissão: Setembro/2019

COMPOSIÇÃO

Glutaraldeído, Acidificante, Álcool Laurílico 7EO, Neutralizante e Água.

PRINCÍPIO ATIVO: Glutaraldeído (2,2% P/P).

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... De incolor a levemente amarelado.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Líquido límpido.

pH:..... 4,0 a 6,0.

Densidade:..... 0,990 a 1,050 g/ml.

Teor de Glutaraldeído:..... 2,0 a 2,5 %.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Manter o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz e calor excessivo.

DESCARTE

Resíduo do produto: O Glutaraldeído não pode ser descartado diretamente na rede de esgoto por se tratar de um produto não biodegradável e poluente, onde o mesmo deve ser neutralizado com o Bissulfito de Sódio (VIC BISSULFITO[®]) ou deve ser recolhido por uma empresa especializada em descarte de materiais perigosos. O descarte deve seguir o protocolo da instituição.

Em caso de derramamento, diluir com água em abundância ou recolher o material com absorvente inerte, como sílica ou areia.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

VIC GLUTARAL CLEAR

Código: FT 055

Revisão: 01

Emissão: Setembro/2019

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.

Vic Glutaral Clear - 1L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8027.001-8.

Vic Glutaral Clear - 5L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8027.002-6.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br