



TERMOGEL IND. E COM. DE PRODUTOS DE ESTÉTICA LTDA

INSTRUÇÃO DE USO

BOLSA TÉRMICA TERMOGEL

Descrição:

A BOLSA TERMOGEL Pode ser usada como bolsa de água quente e compressa gelada. Prática e econômica, é reutilizável, selada, contém um gel não tóxico (CMC-Carboximetilcelulose, Phenonip - ésteres de Parabeno em Phenoxyetanol, Propilenoglicol, Água) que mantém a temperatura por mais tempo que a água.

Indicação do Produto:

COMPRESSA QUENTE:

É indicada para dores musculares e lombares, torcicolo, cólicas abdominais, menstruais, dor de ouvido, distensões e doenças reumáticas.

COMPRESSA GELADA:

É indicada para enxaqueca, febre, contusões, pequenos ferimentos e tratamentos ortopédicos. A aplicação de frio alivia a dor e reduz o inchaço e sangramento

Composição:

Composição para 600 litros de gel

Propilenoglicol	150 litros
CMC – Carboximetilcelulose RD	4 kg
Phenonip (ésteres de Parabeno em Phenoxyetanol)	1 litro
Água	450 litros

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados de Conservação:

Produto não apresenta precauções ou restrições para seu uso.

Manter longe do alcance de crianças.

Modo de Uso:

COMPRESSA QUENTE:

Para aquecer no fogão, mergulhar a bolsa em 3 litros de água fervendo de 3 a 7 minutos (com o fogo aceso).

No micro-ondas, aquecer em recipiente adequado com bastante água por 2 minutos. Se não atingir a temperatura desejada, aquecer mais 30 segundos de cada vez.

COMPRESSA GELADA:

Colocar a bolsa na geladeira de 2 a 4 horas antes de usar, ou no congelador cerca de 30 minutos antes. Se for congelada por mais tempo, ela vai atingir uma temperatura mais baixa, mas vai endurecer. Não manter no congelador por mais de 24 horas, pois o plástico se torna quebradiço.

Após o uso, limpar com pano de algodão úmido. Manter em local seco e limpo. Evitar contato com materiais pontiagudos.

Cuidados de Armazenamento:

Produto não necessita de cuidados especiais de armazenamento ou transporte, deve-se somente ser evitado o contato com materiais pontiagudos.

Fabricado por:

TERMOGEL IND. E COM. DE PRODUTOS DE ESTÉTICA LTDA.
Rua. Conselheiro Elias de Carvalho, 629 – São Paulo – SP – CEP: 04373-000
Tel.(0XX11) 5563-7237 – E-mail: termogel@termogel.com.br
CNPJ: 01.152.141/0001-92 – Indústria Brasileira

Notificação ANVISA nº: 80023590005

FRANCISCO JOSE Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE MARI:01435088816 Data: 2021.10.27 17:54:12 -03'00'
MARI:01435088816
RESPONSÁVEL LEGAL
FRANCISCO JOSÉ MARI


RESPONSÁVEL TÉCNICA
ELIANA YUMI TOYOTA
CRQ IV/SP Nº 04342770

Rua: Conselheiro Elias de Carvalho, nº 629 – Vila Santa Catarina CEP: 04373-000 Jabaquara – SP
Tel: (0xx11) 5563-7237 - e-mail termogel@termogel.com.br / www.termogel.com.br
CNPJ 01.152.141/0001-92 - Indústria Brasileira