

# INSTRUÇÕES DE USO

(VERSÃO 00)

## PINÇA BIPOLAR PARA BISTURI E COAGULADOR

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL. ESTERILIZAR ANTES DO USO.**

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

SIMILAR & COMPATÍVEL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME  
Rua Aliados 653, Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP CEP: 14080-570  
Fone/Fax: (16) 3969-1836 CNPJ - 08.877.271/0001-31  
Autorização de Funcionamento ANVISA – G218596H344X  
Responsável Técnico: Eng. Cesar Pacca Bueno – CREA-SP Nº 170127

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

#### 2.1 Nome Técnico

PINÇA BIPOLAR

#### 2.2 Nome comercial

PINÇA BIPOLAR PARA BISTURI E COAGULADOR


**Registro ANVISA/MS nº :**

### 3. APRESENTAÇÃO, INDICAÇÃO E FINALIDADE





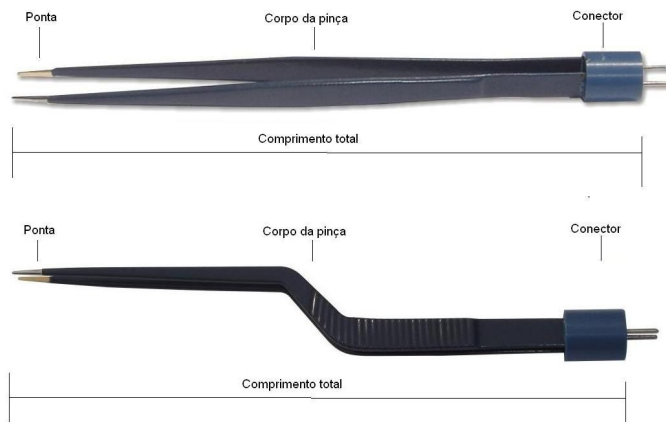

A PINÇA BIPOLAR consiste em produto destinado para eletrocirurgia no qual é realizada a conexão com o bisturi eletrônico por meio de um cabo com o objetivo de realizar coagulação.





A PINÇA BIPOLAR deve ser conectada ao equipamento eletrocirúrgico de maneira idêntica a apresentada nas instruções de uso pelo fabricante do equipamento. Ou seja, uma extremidade do cabo da pinça deverá ser conectada na saída bipolar do bisturi eletrônico e a outra extremidade deverá ser conectada no conector da pinça a fim de transferir a energia fornecida pelo bisturi para a ponta da pinça a fim de realizar o procedimento de coagulação. Estas pinças são conectáveis a todos os bisturis eletrônicos certificados no INMETRO e que possuem registro na ANVISA/MS.





A SIMILAR & COMPATÍVEL possui dois tipos de pinça: Baioneta (PBB) e Reta (PBR), conforme figura a seguir.











## MODELOS BAIONETA (PBB)

DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
PBB-10CM/0,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm).</p>
PBB-10CM/1MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm).</p>
PBB-10CM/1,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm).</p>
PBB-10CM/2MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm).</p>
PBB-10CM/3MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm).</p>
PBB-12CM/0,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm).</p>





PBB-12CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm).</p>
PBB-12CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm).</p>
PBB-12CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm).</p>
PBB-12CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm).</p>
PBB-14CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBB-14CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>






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
PBB-14CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBB-14CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBB-14CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBB-16CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBB-16CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBB-16CM/1,2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,2mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>

PBB-16CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBB-16CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBB-16CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBB-18CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBB-18CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBB-18CM/1,2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,2mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>



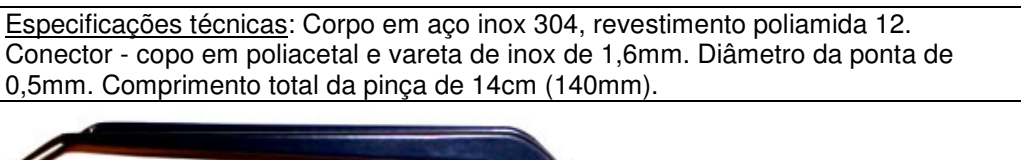

PBB-18CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBB-18CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBB-18CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBB-20CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBB-20CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBB-20CM/1,2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,2mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>















PBB-20CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBB-20CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBB-20CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBB-25CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBB-25CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBB-25CM/1,2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,2mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>







PBB-25CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBB-25CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBB-25CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBBC-14CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBBC-14CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBBC-14CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>

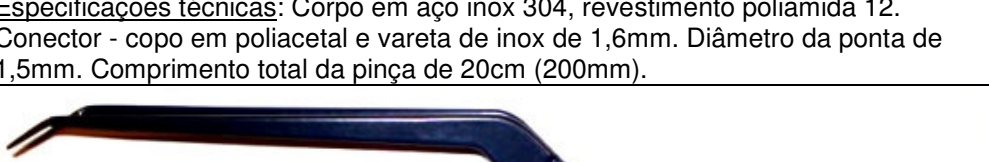

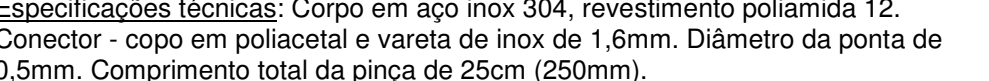
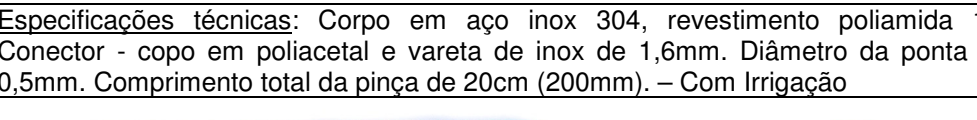
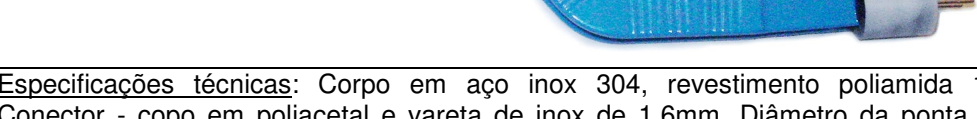


PBBC-14CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBBC-14CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBBC-16CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBBC-16CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBBC-16CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBBC-16CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>

PBBC-16CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBBC-18CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBBC-18CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBBC-18CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBBC-18CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBBC-18CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>

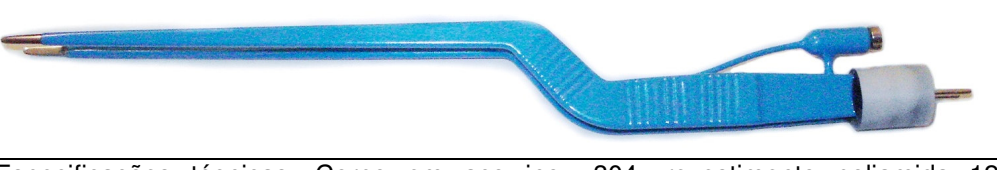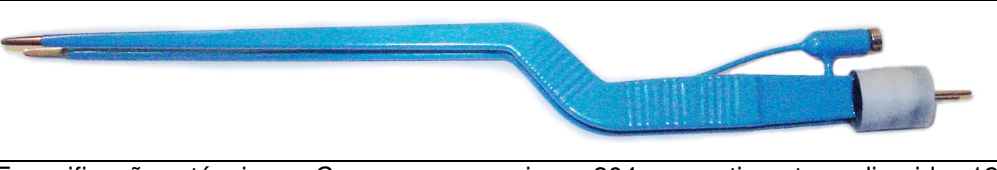






PBBC-20CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBBC-20CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBBC-20CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBBC-20CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBBC-20CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBBC-25CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>

PBBC-25CM/1MM	 <p data-bbox="456 344 1406 432"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBBC-25CM/1,5MM	 <p data-bbox="456 625 1406 714"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBBC-25CM/2MM	 <p data-bbox="456 907 1406 995"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBBC-25CM/3MM	 <p data-bbox="456 1188 1406 1276"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBBI-18CM/0,5MM	 <p data-bbox="456 1449 1471 1537"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm). – Com Irrigação</p>
PBBI-18CM/1MM	 <p data-bbox="456 1730 1471 1818"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm). – Com Irrigação</p>

















PBRI-18CM/1,2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,2mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm). – Com Irrigação</p>
PBRI-18CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm). – Com Irrigação</p>
PBBI-20CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm). – Com Irrigação</p>
PBBI-20CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm). – Com Irrigação</p>
PBBI-20CM/1,2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,2mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm). – Com Irrigação</p>
PBBI-20CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm). – Com Irrigação</p>








## MODELOS RETA (PBR)








DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
PBR-10CM/0,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm).</p>
PBR-10CM/1MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm).</p>
PBR-10CM/1,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm).</p>
PBR-10CM/2MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm).</p>
PBR-10CM/3MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm).</p>
PBR-12CM/0,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm).</p>
PBR-12CM/1MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm).</p>











PBR-12CM/1,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm).</p>
PBR-12CM/2MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm).</p>
PBR-12CM/3MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm).</p>
PBR-14CM/0,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBR-14CM/1MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBR-14CM/1,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBR-14CM/2MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>







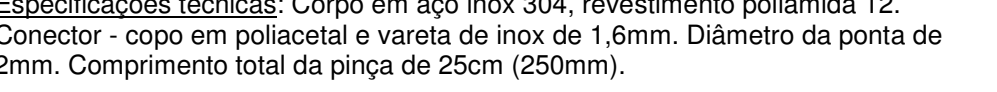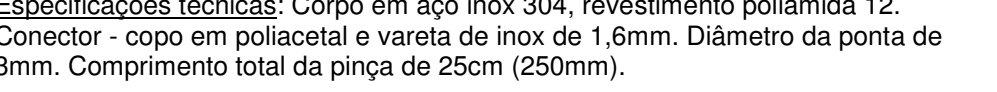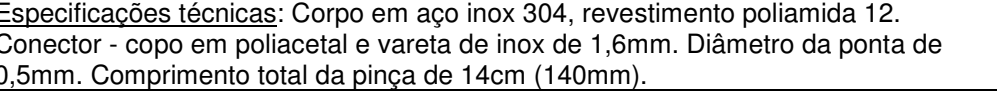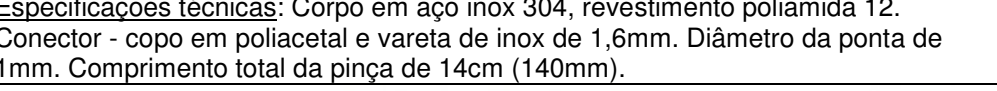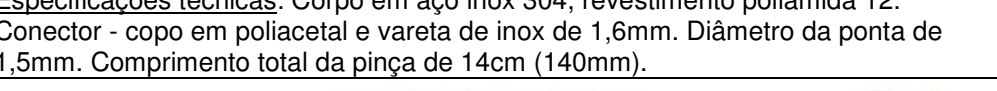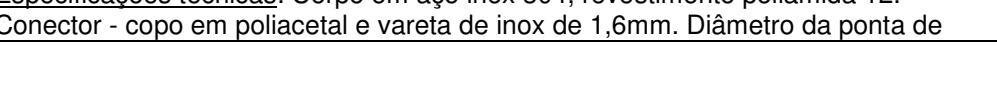

PBR-14CM/3MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBR-16CM/0,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBR-16CM/1MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBR-16CM/1,2MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,2mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBR-16CM/1,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBR-16CM/2MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBR-16CM/3MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>

PBR-18CM/0,5MM	 <p data-bbox="456 268 1463 359">Especificações técnicas: Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBR-18CM/1MM	 <p data-bbox="456 506 1463 596">Especificações técnicas: Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBR-18CM/1,2MM	 <p data-bbox="456 743 1463 833">Especificações técnicas: Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,2mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBR-18CM/1,5MM	 <p data-bbox="456 1010 1463 1100">Especificações técnicas: Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBR-18CM/2MM	 <p data-bbox="456 1247 1463 1337">Especificações técnicas: Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBR-18CM/3MM	 <p data-bbox="456 1484 1463 1575">Especificações técnicas: Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBR-20CM/0,5MM	 <p data-bbox="456 1722 1463 1812">Especificações técnicas: Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>









PBR-20CM/1MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBR-20CM/1,2MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,2mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBR-20CM/1,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBR-20CM/2MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBR-20CM/3MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBR-25CM/0,5MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBR-25CM/1MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>















PBR-25CM/1,2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,2mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBR-25CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBR-25CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBR-25CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBRC-14CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBRC-14CM/1,00MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBRC-14CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBRC-14CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de</p>






PBRC-14CM/3MM	<p>2mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p> 
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm).</p>
PBRC-16CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBRC-16CM/1,0MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBRC-16CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBRC-16CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBRC-16CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 16cm (160mm).</p>
PBRC-18CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBRC-18CM/1,00MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>




PBRC-18CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBRC-18CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBRC-18CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 18cm (180mm).</p>
PBRC-20CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBRC-20CM/1,00M	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBRC-20CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBRC-20CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>
PBRC-20CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 20cm (200mm).</p>

PBRC-25CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBRC-25CM/1MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBRC-25CM/1,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1,5mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBRC-25CM/2MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 2mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBRC-25CM/3MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 3mm. Comprimento total da pinça de 25cm (250mm).</p>
PBRV-10CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm). - Vasectomia</p>
PBRV-12CM/0,5MM	
	<p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm). - Vasectomia</p>

<p>PBRO-10CM/0,5MM</p>	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm). - Oftalmologia</p>
<p>PBRO-12CM/0,5MM</p>	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm). - Oftalmologia</p>
<p>PBRO-14CM/0,5MM</p>	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 14cm (140mm). - Oftalmologia</p>
<p>PBBO-10CM/0,5MM</p>	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm). - Oftalmologia</p>
<p>PBBO-10CM/1MM</p>	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm). - Oftalmologia</p>

PBBO-12CM/0,5MM	 <p data-bbox="456 390 1471 485"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm). - Oftalmologia</p>
PBBO-12CM/1MM	 <p data-bbox="456 751 1471 846"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm). – Oftalmologia</p>
PBRO-10CM/0,5MM	 <p data-bbox="456 1108 1471 1203"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm). - Oftalmologia</p>
PBRO-10CM/1MM	 <p data-bbox="456 1434 1471 1528"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 10cm (100mm). - Oftalmologia</p>
PBRO-12CM/0,5MM	 <p data-bbox="456 1759 1471 1854"><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 0,5mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm). - Oftalmologia</p>



PBRO-12CM/1MM	 <p><u>Especificações técnicas:</u> Corpo em aço inox 304, revestimento poliamida 12. Conector - copo em poliacetal e vareta de inox de 1,6mm. Diâmetro da ponta de 1mm. Comprimento total da pinça de 12cm (120mm). - Oftalmologia</p>
---------------	---

### 3.1 Relação dos acessórios opcionais destinados a integrar o produto

Para utilização da pinça bipolar é necessário efetuar sua conexão com a saída bipolar do bisturi eletrônico. Assim sendo, a SIMILAR & COMPATÍVEL disponibiliza o cabo para efetuar esta conexão. Portanto, caso não tenha o cabo solicite de nosso departamento comercial.



#### **Especificações técnicas:**

Cabo: silicone de 4mm com 3 metros de comprimento

Plugues banana: latão cromado padrão de 3,96mm para conexão na saída bipolar do bisturi.

Conector da pinça: copo em poliacetal para conexão de pinças de 1,6mm de diâmetro.

Estes materiais são atóxicos e suportam temperaturas de até 134 °C.

### **4. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, MANIPULAÇÃO E ADVERTÊNCIAS**

- ✓ Este produto é destinado para uso de profissional qualificado.
- ✓ Verificar antes de cada utilização suas condições. Caso apresente alteração deverá ser descartado.
- ✓ Mantenha armazenado sempre em local limpo, seco e arejado.
- ✓ Certifique-se que as conexões do cabo da pinça e pinça esteja adequada.
- ✓ Ao manusear proceda de maneira cuidadosa a fim de que se evitem choques, quedas, impactos, trações, torções, entre outros, assegurando sua integridade e uma maior vida útil.
- ✓ Verifique periodicamente seu estado de conservação. Caso possua trincos, fissuras, desprendimento das partes, arranhões, partes quebradas, inutilize o produto.
- ✓ Jamais utilize materiais abrasivos ou corrosivos durante a limpeza.
- ✓ Após a utilização, lavar, secar e esterilizar.
- ✓ Proceda a secagem completa antes de esterilizar. Jamais deixe secar espontaneamente.
- ✓ Certifique-se que a pinça esteja limpa e esterilizada antes de cada utilização. Inclusive na primeira vez que for utilizá-la.
- ✓ Caso a pinça não esteja sendo utilizada, mantenha fora de contato com o paciente. Manter em local limpo, seco, não condutor e bem visível. Caso tenha contato inadvertido com o paciente poderá provocar queimaduras.

- ✓ Assegure que todos os ajustes no bisturi foram devidamente configurados antes de iniciar a cirurgia.
- ✓ Jamais tente conectar o cabo e a pinça com o bisturi ligado. Deve-se conectar o cabo e a pinça antes de ligar o bisturi
- ✓ Leia as instruções de uso do bisturi eletrônico para a correta conexão da pinça.

## **5. INSTRUÇÕES DE USO**

- ✓ Certifique-se que o equipamento esteja desenergizado
- ✓ Conectar os plugues banana do cabo da pinça na saída bipolar do bisturi
- ✓ Conectar a pinça no conector do cabo
- ✓ Ligar o bisturi
- ✓ Ajustar a potência necessária no bisturi
- ✓ Escolher o modo de operação no painel do bisturi para coagulação
- ✓ Aplique a pinça no tecido para realização do procedimento

A pinça deve ser conectada ao equipamento eletrocirúrgico de maneira idêntica a apresentada nas instruções de uso pelo fabricante do equipamento.

## **6. EFEITOS SECUNDÁRIOS INDESEJÁVEIS OU COLATERAIS E CONTRA-INDICAÇÕES**

Não possui contra-indicações.

## **7. SEGURANÇA E EFICÁCIA**

Este produto é fabricado em concordância com o controle de qualidade implementado pela empresa a fim de atender a RDC 59 – Boas Práticas de Fabricação, os quais assegura que serão produzidos conforme padrão pré-estabelecido a fim de proporcionar qualidade, segurança e eficácia.

O projeto foi conduzido a fim de estabelecer a segurança, eficácia e ergonomia necessária durante sua utilização.

## **8. INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA REUTILIZAÇÃO**

A SIMILAR & COMPATÍVEL recomenda que a central de esterilização ou pessoal qualificado efetue medidas capazes de assegurar que a pinça seja adequadamente limpa e esterilizada antes dos procedimentos cirúrgicos.

### 8.1 Limpeza e esterilização

(pinça e cabo)

- ✓ Limpar em água corrente, sabão neutro e escova.
- ✓ Se possível lavar em lavadoras ultra sônicas a fim de garantir a limpeza
- ✓ Efetuar a secagem completa
- ✓ Esterilizar em autoclave com temperatura até 134°C por 15 minutos

## **9. INFORMAÇÕES SOBRE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA**

### 9.1 Manutenção preventiva



A manutenção preventiva deve ser uma prática rotineira a fim proporcionar maior vida útil ao produto. Algumas recomendações deverão ser adotadas:

- ✓ Limpeza e esterilização, inclusive na primeira vez que for utilizar o produto.
- ✓ Verificar periodicamente o estado de conservação. Caso possua trincos, fissuras, desprendimento das partes, rompimento da isolamento, arranhões ou partes quebradas, descartar o produto.
- ✓ A pinça e cabo possuem garantia de três meses decorrentes de defeitos de fabricação. Entre em contato com a fábrica se necessário.

### 9.2 Manutenção corretiva

Caso ocorram danos na pinça ou no cabo, deve-se segrega-los em local adequado com a devida identificação. Este procedimento visa coibir a utilização indevida.

Sempre que necessário entre em contato com a assistência técnica da fábrica para que receba as orientações na solução do problema ou no envio do produto a fábrica.

Qualquer intervenção no produto por pessoas que não a assistência técnica da fábrica acarretará automaticamente na perda da garantia.

Caso necessário entre em contato com a fábrica para requisitar os serviços de assistência técnica corretiva. Para tanto, os seguintes itens deverão ser enviados:

- Cópia da nota fiscal de compra
- Relatório descritivo do problema
- Produto

Caso tenha que enviar o produto para a fábrica, limpe e esterilize. Assim, será resguardada a saúde das pessoas que irão manuseá-lo. O endereço para envio consta no item 1 destas instruções.

## **10. PRECAUÇÕES A SEREM ADOTADAS PARA ELIMINAÇÃO DO PRODUTO**

A preservação do meio ambiente, assim como o uso indevido do produto após inutilização deve ser uma preocupação de todos. Desta forma, a SIMILAR & COMPATIVEL recomenda que se o produto for inutilizado e não puder ser descartado com segurança, o mesmo deverá ser enviado à empresa que fará o descarte apropriado. Portanto, segregue o produto, limpe, esterilize, embale, descreva um relatório do motivo do descarte e envie à fábrica para que seja efetuado seu descarte com segurança.

## **TERMO DE GARANTIA**

Prezado consumidor, este produto possui a garantia SIMILAR & COMPATÍVEL, conforme descrito abaixo.

1. A garantia deste produto é de três meses, a contar de emissão da nota fiscal de compra.
2. Deverá ser apresentada a cópia da nota fiscal de compra no momento da entrega do produto a empresa para produtos dentro do prazo de garantia.
3. Este produto tem garantia contra defeitos de fabricação e serviços técnicos. A garantia contempla a substituição de componentes e mão de obra que comprovadamente apresentem defeitos em condições normais de utilização, sem ônus ao consumidor.
4. A garantia não se aplica a defeitos ocasionados por choques, quedas, impactos, trações, torções, quedas, manuseio inadequado, procedimentos de limpeza e esterilização inadequadas ou procedimentos em desacordo com as Instruções de Uso do produto.
5. A garantia será invalidada se o produto sofrer qualquer intervenção por pessoas não autorizadas pela SIMILAR & COMPATÍVEL e ser utilizado em procedimentos nos quais o mesmo não fora projetado.

---

Representante Legal  
Onofre Antonio Giroto

---

Responsável Técnico  
Cesar Pacca Bueno