



FITA DE SILICONE TRATAMENTO DE QUELOIDE, HIPERTROFIA DE CICATRIZ, VERMELHIDÃO, CICATRIZES ANTIGAS E QUEIMADURAS – MARCA KELOGEL® -

## DADOS TÉCNICOS | INSTRUÇÕES

---

KELOGEL® Gel de Silicone para Cicatrização

Descrição do produto:

O Gel de Silicone Adesivo KELOGEL® é um produto não estéril, composto por Silicone de grau médico.

Tamanhos:

Características:

- transparente, fácil de observar a situação da cicatriz.
- boa aderência, a curto e longo prazo, possui outra membrana externa não aderente.
- durável e reutilizável.
- confortável e fácil de usar.
- sem irritação, baixa sensibilidade.

Estrutura:

- 1- Revestimento de proteção
- 2- Gel de silicone
- 3- Suporte do filme

Composição:

Revestimento de proteção | polipropileno ou filme de pet ou polietileno

Gel de silicone | polissiloxano

Composição suporte de filme | borracha de silicone, tecidos elásticos ou poliuretano filme e não tecido

Indicação: O Gel de Silicone Adesivo Kelogel® é eficaz na gestão de cicatrizes já existentes e novas cicatrizes hipertróficas ou queloides com o tratamento profilático em feridas fechadas. Deve ser usada em feridas, traumas, queimaduras, pós parto (cesárea), cirurgia plástica ou em qualquer cirurgia, esse produto auxilia na prevenção ou para quem possui predisposição de hipertrofia de cicatriz ou formação de queloides, melhorando a aparência, diminuindo espessura de cicatrizes novas e até mesmo antigas.

Contra Indicação: evite o uso do produto se for alérgico a borracha de silicone.

NÃO USE em feridas que não foram curadas.

Benefícios:

- \* cicatrizes mais claras, menos avermelhadas e menos espessas.
- \* hidratam a pele da área da cicatriz.
- \* acelera e auxilia no processo de renovação da pele.
- \* produto hipoalérgico.

Modo de usar: retirar a película protetora e aderir ao lado hidratante (colante) adesivo na região a ser tratada.

Permanência de uso: usar de 8 a 12 horas (consulte seu médico) no período diurno ou noturno, com pausa entre 2 a 4 horas entre os períodos de uso, ou sob orientação médica.

Ser estiver usando alguma pomada, usar no período de descanso pois ela pode interferir no desempenho do produto, não usar a fita em pele molhada ou oleosa. Após a retirada da película protetora, a vida útil do gel em uso é de 2 a 4 semanas, conforme cuidado do produto, recomenda-se o uso do Gel de Silicone Adesivo Kelogel® de 90 dias no mínimo, para um melhor resultado aconselhamos 180 dias.

Conservação: lavar sempre que necessário com água morna e sabonete neutro, enxaguar com água morna e limpa, secagem natural a sombra por 4 horas.

Orienta-se após o uso, colar o gel em plástico filme ou na película protetora original da embalagem.

Recomenda-se o uso de modelador, cinta ou malha cirúrgica, ou algo que comprima o local, para que a mesma não escorregue, se caso não esteja utilizando os acessórios recomendados, cobrir com micropore, para melhor fixação.

Dúvidas mais Frequentes:

Como a fita Kelogel age na cicatriz?

R: A fita de silicone de grau médico, faz que o local tratado produza mais líquido, agindo de tal forma hidratando a pele, o organismo responde retomando o tônus, suavizando os sinais, acelerando e melhorando o processo de cicatrização.

Essa fita Kelogel serve para qualquer tipo de cirurgia?

R: Sim, o uso da fita Kelogel pode ser em qualquer tipo de cirurgia, exemplos: plástica, pós parto, ortopédica, em cicatrizes de cirurgias, queimaduras ou machucados.

Quanto tempo dura cada fita Kelogel?

R: Dura em torno de 2 a 4 semanas (até 6 semanas), conforme o uso adequado do produto.

Quanto tempo devo usar a fita Kelogel para ver os resultados?

R: Mínimo de 90 dias, e para resultados excelentes em torno de 180 dias.

Quando começo a usar a fita Kelogel?

R: seu Médico vai te orientar no melhor momento, mas em média a partir de 10º ou 15º dia de pós cirurgia, mas as feridas tem que estar totalmente fechada.

Tenho que realmente usar com cinta, malha, soutien cirúrgico ou algo que comprima a cicatriz?

R: Há necessidade sim, até mesmo para melhor resultado, caso não utilize esses acessórios, a fita pode enrolar ou escorregar, se não for mais indicado o uso destes acessórios, usar micropore, isso ajuda a comprimir.

Existe outros modelos e tamanhos diferentes?

R: Sim, temos vários modelos e tamanhos:

20cm|35cm|50cm|70cm|Areolar|T Invertido.

Onde posso encontrar os produtos Kelogel:

R: Em sites próprios de nossa rede ou distribuidores autorizados.

**MEDFORMA IMPORTADORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI**

CNPJ:33.811.197/0001-06

Rua: Goiás 112 Centro Sorocaba SP

[sac@medforma.com.br](mailto:sac@medforma.com.br)