

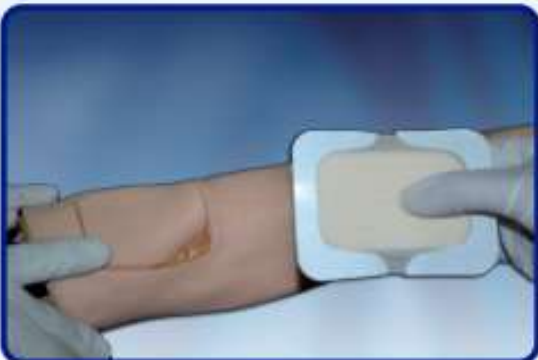



## HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO WOUND CARE G

<b><u>Modelo Comercial:</u></b>	Hidrogel Amorfo com Alginato
<b><u>Modelo:</u></b>	- Hidrogel Amorfo com Alginato 85g – FP0095 - Hidrogel Amorfo com Alginato 30g – FP0094
<b><u>Linha:</u></b>	Curativos Avançados
<b><u>Indicação de uso:</u></b>	<p>Indicado para o tratamento de feridas necróticas e/ou com exsudato, como úlceras da perna, úlceras de pressão e úlceras de pé diabético não infectadas. Também é indicado para tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau. Este gel pode ser usado durante o processo de cicatrização, para proporcionar um ambiente úmido de cicatrização de feridas. Pode ser utilizado em lesões com infecções locais e sistêmicas sob a supervisão de um profissional de cuidados de saúde.</p>
<b><u>Especificação Técnica</u></b>	<p><b>Composição:</b> Água purificada, croscarmelose sódica, poliol, carbômero, hidróxido de sódio e alginato de cálcio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produto estéril;</li> <li>- Embalado individualmente;</li> </ul> <p><b>Instruções de uso:</b> Preparar / Enxaguar a ferida com solução fisiológica estéril.</p> <p>Para otimizar a utilização, aplicar de acordo com o diagrama abaixo:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Se indicado, aplicar uma cobertura conforme ilustrado abaixo (item fornecido à parte):</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Secar cuidadosamente a pele à volta da ferida;</p> <p>A ferida não deve ser preenchida em um nível mais alto que a pele ao redor.</p>

	<p>Cobrir o leito da ferida com um curativo secundário. Para feridas de baixo a alto nível de exsudato, utilizar espuma absorvente permeável. Para feridas com quantidade insignificante de exsudato, fazer a cobertura com um curativo filme estéril.</p> <p>Para otimizar a limpeza de feridas com necrose, recomenda-se que o hidrogel seja trocado pelo menos a cada 72 horas ou quando necessário, considerando a quantidade de exsudato. No caso de feridas limpas, deve ser trocado considerando a quantidade de exsudato.</p> <p>O gel pode ser removido da ferida lavando-a com água ou solução fisiológica estéril</p> <p><b>Advertências / Precauções:</b> Pode ser utilizado em pacientes com infecções locais e sistêmicas sob a supervisão de um profissional de saúde. Em caso de reação alérgica, descontinuar a sua utilização e consultar o médico. Apenas para uso externo. Não reutilizar o produto (a reutilização pode causar risco de infecção). Caso a embalagem se encontre danificada, não reesterilizar e não utilizar o produto.</p> <p><b>Contraindicações:</b> Não aplicar em queimaduras profundas e extensas.</p> <p><b>Condições de armazenamento e conservação:</b> Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o produto tiver vencido. Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob Temperatura: +0° à +40°C – Umidade Relativa: 80% máx. Apenas pode ser utilizado se encontrado íntegro na sua embalagem original de fabricação, ou seja, sem qualquer alteração nas suas características originais.</p> <p><b>Validade:</b> 3 anos</p>
<b><u>Fabricante</u></b>	Pharmaplast S.A.E – Amria Free Zone, Alexandria – Egito.
<b><u>Importado e Distribuído</u></b>	Polar Fix
<b><u>Procedência</u></b>	Importado
<b><u>Cadastro na Anvisa</u></b>	8003400121
<b><u>Responsável Técnico</u></b>	Leila M. Leal S. Barros CRF/SP: 49.339