

# ORTOCENTER



# A.P.H. RESGATE



## Apoio Lateral de Cabeça Head Block

Produzido por Ortocenter Aparelhos Ortopédicos Ltda. - ME.  
CNPJ nº. 54.421.953/0001-52 - INS. EST. nº. 111.265.776-112  
ANVISA nº. 1.03.359-1 - SIVISA nº. 355030890-325-000124-1-6  
Eng. Responsável: Sérgio Donizeti Riba CREA nº. 5060548503/D

### RECOMENDAÇÕES:

Sua utilização deve ser feita (sempre que possível) por profissionais da área. Material de reutilizável aceita assepsia

## IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK ou COXIM

Ref.: OF. 2010ª

RMS Nº. 130935910012

### Características

Confeccionado em duas partes: blocos e base.

Material dos blocos: Copolímtero de Etil Vinil Acetado (E.V.A. Lux 35), mais PEBD, com cargas minerais, sintéticas, brancas, neutras, expansivas e reticuladoras. Absorção de água - 2,3% (DIN 5328); Temperatura de uso +70°C/-50°C (MAX e MIN); Resistência a ácidos solventes e cloreto;

Resistência às detergentes; Produto atóxico, inclusive no emborrachamento a frio;

Excelente flutuação;

Características gerais - bloco e base.

Confeccionado no material acima especificado, de células fechadas e recobertas com tintas de emborrachamento a frio na cor amarela. De fácil limpeza com água e sabão neutro. Translúcida e refletiva (a tinta). Composto de 90% (noventa por cento) dos descritivos já mencionados de base de apoios dos velcros em tecidos sintéticos - atóxico mesmo depois de emborrachado. Constituem de 03 peças - tijolos e base - mais 02 peças do mesmo material. Sendo a testeira e queijeira, além de tiras de prolipropileno de 30 cm de espessura, tendo cada fita 85 cm de comprimento. Seu velcro 50 cm, na cor preta, costurados e colados. A base e os tijolos têm as seguintes medidas aproximadas: base 40 X26 cm, blocos 28 X 0,8 cm.

### Medidas do Aparelho:

Tijolos medindo comprimento de 25 cm, largura 0,7 cm e a altura de 15 cm.

Base: forma retangular para a fixação na cabeça de pranchas; medidas, comprimento de 40 cm, largura de 26 cm e espessura de 0,2 cm.

### Peso:

Tijolos - cada tijolo pesa aproximadamente 150 gramas, totalizando os dois tijolos em 300 gramas.

Base - sua base pesa aproximadamente 450 gramas.

### Componentes do conjunto:

Velcro - nos tijolos, velcro de 50 mm de largura, preto, com aproximadamente 18 cm em cada tira, totalizando 72 cm em velcros, na base, também dois velcros de 100 mm, costurado. Testeiras, com quatro tiras de 0,30 mm cada, totalizando 85 cm cada tira. e no conjunto de quatro tiras.

Apoios em queixo, e testa - dois apoios, com material citado, transpassado, por fita de polipropileno, e totalmente emborrachado a frio. Cada apoio tem o comprimento de 26 cm em E.V.A. Lux PEBD, além das fitas de 0,30cm em polipropileno.

Fitas de apoio à prancha - possui três fitas de polipropileno de 0,30cm com comprimento aproximado de 28 cm com fecho em velcro preto, da mesma medida de largura.


### Embalagem

Em saco plástico transparente, reembalado em caixa de papelão individual.



**Ortocenter Aparelhos Ortopédicos Ltda. EPP (CNPJ) nº. 54.421.953/0001-52**  
Rua: Baronesa de Bela Vista, 55 - Jd. Aeroporto - São Paulo - SP CEP 04612-000.  
Tel. 55 11 5095-8555 / Fax. 55 11 5093-7100 - e-mail. [ortocenter.aph@gmail.com](mailto:ortocenter.aph@gmail.com)  
Registro na Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o nº. **1.03.359-1.**



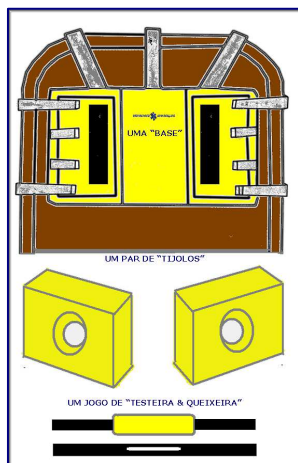

## **APOIO LATERAL DE CABEÇA "COXIM HEAD BLOCK" OF. 2010 RMS Nº 10335910012**

### INDICAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DO IMOBILIZADOR DE CABEÇA

Indicado para imobilizar a cabeça no caso de resgate de pacientes, dando maior conforto e segurança em resgate e remoções. Apoio para a cabeça, onde permite maior fixação ao mesmo e, aberturas em torno das orelhas, para melhor visualização de sangramento ou fluidos. É recomendável seu uso com o colar do tipo resgate ou outros apropriados para tal finalidade.

### **COLOCAÇÃO DO APOIO**

- As fitas do meio, esquerda e direita, deveram ser presas na parte superior da maca, com os velcros.
- Deveram ser presas as fitas na lateral da maca, as fitas do lado esquerdo e direito da base do apoio. Esta fixação é feita através dos passadores.
- Deveram ser presos os dois tijolos de etil vinil acetato, no velcro da base, deixando para baixo, os cortes nas peças que, fixarão corretamente a cabeça da vítima.
- Passar as fitas por cima dos "tijolos", fitas estas, para testa e queixo, passando as tiras nos passadores e prendendo com velcro.

### **ASSEPSIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

**ASSEPSIA**, LAVAR DE **PREFERÊNCIA**, COM ÁGUA MORNA e SABÃO ou SABONETE NEUTRO, SECAR, COM UM PANO LIMPO, GUARDAR A SOMBRA, **NÃO** EXPOR POR MUITO TEMPO AO SOL e a ÁGUA, **NÃO** USAR HIPOCLORITO DE SÓDIO, SOLVENTE, ÁLCOOL ou PRODUTOS QUÍMICOS

**ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP**  
CNPJ Nº. 54.421.953/0001-52 IE Nº. 111.265.776-112 IM Nº. 2.244.418-1  
ANVISA Nº. 1.03.359-1 SIVISA Nº. 355030890-325-000124-1-6 SITE [www.ortocenternet.com.br](http://www.ortocenternet.com.br)  
TEL. 55 11 5095-8555 FAX. 5096-5851 ID 122\*37974 e-mail [ortocenter.aph@gmail.com](mailto:ortocenter.aph@gmail.com)