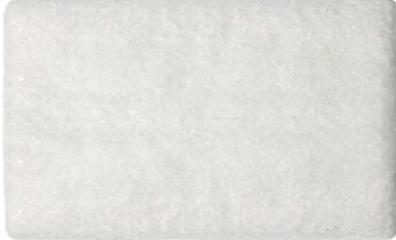


### FICHA TÉCNICA

IMAGEM DO PRODUTO	CÓDIGO DO PRODUTO
	MFIL – EBS   MFIL – BSTC   MFIL – ESO – MS   MFIL – ESYNC MFIL – BS8   MFIL – BS8 – MS   MFIL – BSYNC   MFIL – B – S10/S9 MFIL – BAL   MFIL – BDRS
	<th data-bbox="676 629 1552 712">DESCRIPTIVO</th>
FILTROS BARREIRA NÚMERO ANVISA: 82454469001	

### DESCRIÇÃO E INDICAÇÕES DO PRODUTO

O Filtro utilizado nos equipamentos de CPAP/BIPAP é indispensável no tratamento de apneia do sono. Com o constante uso do aparelho, o filtro para CPAP/BIPAP acaba acumulando poeira, ácaros e bactérias que estão presentes no ar. Portanto o filtro precisa ser trocado regularmente para garantir a eficiência do tratamento.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOME TÉCNICO	Filtro Pólem / Bactérias
NOME COMERCIAL	Filtro CPAP
NCM	90192010
REGISTRO NA ANVISA	82454469001
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	II – Médio Risco
ESPERILIZAÇÃO COMPATÍVEL	<input checked="" type="checkbox"/> Produto não estéril – Uso único

### CONSTRUÇÃO DO PRODUTO

MATERIAL	Poliuretano Poliéster
LARGURA	36 mm
COMPRIMENTO	54 mm

### **INSTRUÇÕES DE USO**

A troca do Filtro CPAP/BIPAP deve ser realizado uma vez a cada (30) trinta dias. É essencial que o usuário monitore diariamente e identifique caso o filtro do CPAP/BIPAP precise ser trocado, em casos de o filtro apresentar acúmulo de poeira.

Como trocar:

- 1) retire o filtro do compartimento de entrada de ar e realize a troca
- 2) descartar o filtro substituído, não reutilizar.

### **PRECAUÇÕES**

Qualquer alteração no formato, cor e cheiro são indicativos de algo, pode ter acontecido, como a proliferação de bactérias e fungos. Substitua o filtro imediatamente.

### **CUIDADOS PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Manter o produto em local seco e isento de luz.

Apresentação: venda por unidade em embalagem plástica.

## **FABRICANTE / DISTRIBUIDOR**

---

**MED FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**

**CNPJ: 43.396.342/0001-85**

**AUT. DE FUNCIONAMENTO: 8245446**

**RUA ALAGOAS, 390 CENTRO – SÃO CAETANO DO SUL – SP**

**FONE: (11) 2668-1117 / (11) 2668-1118**