

## 1) NOME COMERCIAL

Endo Ice

## 2) DESCRIÇÃO

O Endo Ice é um produto que apresenta a capacidade de resfriamento (congelamento) ao ser aplicado sobre uma superfície (algodão). Esta parte resfriada ao ser colocada sobre o dente é percebida pelo paciente caso o dente esteja com vitalidade. Se o dente perdeu a vitalidade, o paciente não sentirá a sensação de gelado, isto confirmará o objetivo do produto que é promover teste de vitalidade.

## 3) INDICAÇÃO DE USO

Spray para teste de vitalidade com odor mentolado

## 4) APRESENTAÇÃO

Modelo Comercial: 0202053- TUBO ENDO ICE MAQUIRA 45X165MM C/VER PAM

Embalagem primária: Lata confeccionada em alumínio - Conteúdo: 200ml (100g)

Acondicionada uma unidade do produto

## 5) COMPOSIÇÃO

Butano desodorizado, etanol, benzoato de sódio, água desmineralizada, essência mentol

## 6) MODO DE USO

Agite fortemente a embalagem, com auxílio do bico atuador, acione levemente a válvula por aproximadamente 3 segundos sobre um rolete de algodão dental e aplique este na superfície da cavidade oral desejada.

## 7) ADVERTÊNCIA

Produto pressurizado e inflamável;

Não perfure ou incinere a embalagem, mesmo estando vazia;

Evite a inalação deste produto e proteja os olhos durante a aplicação;

Não aplique sobre a pele ferida ou irritada;

Em caso de irritação ou alergia, suspenda o uso.

## **8) PRECAUÇÃO**

Leia as Instruções de uso;

O produto é indicado somente para uso profissional;

Não aplique o produto diretamente nos dentes, pode causar queimaduras nos tecidos;

Não deixe ao alcance de crianças.

## **9) CONTRAINDICAÇÃO**

Não há

## **10) EFEITO ADVERSO**

Até o momento não foi identificado nenhum efeito adverso do produto. Nenhum efeito colateral é esperado se o produto for usado de acordo com as instruções.

## **11) CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol, fonte de calor superior a 50°C ou agentes oxidantes.

## **12) PRAZO DE VALIDADE**

2 anos

Após aberto e conservado nas recomendações do fabricante a validade do produto mantém-se estável por 2 anos após a data de fabricação.

## **13) MODO DE DESCARTE**

Não reutilizar o produto e descartar de acordo com a legislação local.

## **14) DIZERES LEGAIS**

Maquira Indústria de Produtos Odontológico S/A

End: Av. Melvin Jones 773 Pq Industrial bandeirantes

Maringá - Paraná

CEP: 87070-030

Responsável Técnico: Kellen Dib CRF-PR 15.807

Reg. ANVISA: 80322400144

Data de revisão: 09/09/2019 – Rev. 05

15) SIMBOLOGIA

	Não re-utilize
	Fabricante
	Atenção, leia a Instrução de Uso
	Consulte as Instruções de Uso
	Data de validade
	Número de catálogo
	Número de lote
	Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Manter longe da luz solar
	Manter afastado da chuva
	Limite Máximo de Temperatura