

# SERINGAS PARA INSULINA UNIQMED - 0,3mL – 8x0,30mm

**Nome Técnico:** Seringas Descartáveis

**Part Number:** UM-FIS004

**Marca / Submarca:** UNIQMED

**Código de barras:** 8809253005044

**Modelo:** Seringas para insulina – 0,3mL (5/16”) – 8x0,30mm – 30G

**Insulina U-100:** para 30 unidades ou menos

**Cada traço na escala de graduação representa 1 unidade**

**Atóxica | Apirogênica | Latex Free**

Seringa estéril de uso único para insulina com agulha fixa

- Agulha Ultra-fina – Bisel Multi-facetado com revestimento lubrificante, que permite a injeção mais suave e confortável


**Metodo de esterilização:** **ESTÉRIL OE** - Esterilidade garantida por óxido de etileno.

**Produto certificado pelo INMETRO** - Portaria n.º 503, de 29 de dezembro de 2011.

**Apresentação:** Caixa com 100 unidades (10x10)



**Indicação:** As Seringas para Insulina com Agulha - Uniqmed são produtos de finalidade médica, para administração de medicamentos como a insulina, consiste em tubo graduado com êmbolo móvel, conectados a agulha.

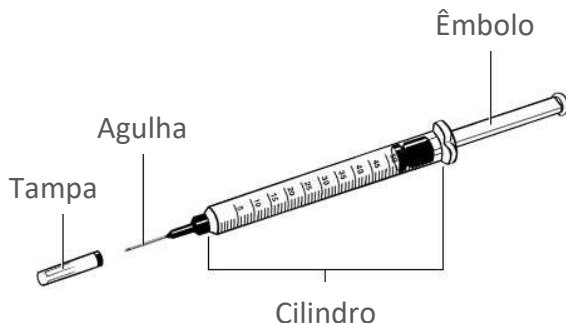

*Imagem ilustrativa da seringa para insulina*

## Composição:

**Cilindro:** Polipropileno / CAS No. 9003-07-0

**Êmbolo:** Polipropileno / CAS No. 9003-07-0

**Vedação:** Mistura de: Poliisopreno (100 partes), Enchimento (70 partes) e Acelerador (0.1 parte)

**Agulha:** Aço Inoxidável / STS 304L

**Tampa:** Polietileno / CAS No. 9002-88-4

# SERINGAS PARA INSULINA UNIQMED - 0,3mL – 8x0,30mm

## Instruções de Uso:

1. Para expor o êmbolo, gire a tampa inferior e puxe para desconectar;
2. Para expor a agulha, gire a tampa superior e puxe para desconectar. Tenha cuidado para não danificar a agulha;
3. Para ajustar a dose corretamente utilize a linha superior da ponta do êmbolo, ajustando a dose na escala de graduação impressa no corpo da seringa;
4. Use a seringa apenas uma vez. Descarte em local apropriado após a utilização.

**Validade:** 05 anos

## Condições de Armazenamento:

Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente, ao abrigo da luz.

## Precauções e Restrições de Uso:

- Produto Estéril, a esterilidade é mantida até que o lacre individual permaneça intacto.
- Proibido Reprocessar, Produto de uso único, Descartar após uso.
- Descartar o produto de acordo com as recomendações locais e nacionais.
- Não utilizar produtos vencidos ou com a embalagem danificada.
- Utilize técnica asséptica antes de realizar o procedimento;

## Para pacientes que utilizam mais de um tipo de insulina:

- Não altere a ordem da mistura prescrita pelo médico;
- Não altere o modelo e a marca da seringa e agulha sem consultar o médico ou farmacêutico;
- Siga estas recomendações para evitar erros de dosagem

**Registro ANVISA/MS:** 10098710053 | **Classe de Risco:** II | **Validade do Registro:** Vigente

**Fabricante:** Feel Tech Bio Co., LTD. | 1079-20, Charyeonggoge-ro, Gwangdeok-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, chungcheongnam-do - Coréia

**Procedência:** Made in Coréia

**Observações:**



## IMPORTADOR | DISTRIBUIDOR:

SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA. | CNPJ: 61.485.900/0001-60

Rua Avanhadava, 675- Bela Vista – São Paulo/SP – 01306-001 | Tel/fax: 11 3218-1700

SAC: sac@sgtecnologia.com.br | Resp Técnico: Carmen Saez – CRBM-SP: 3231