

Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.



Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327, Distrito Industrial Hugo Parin, CEP: 84990-000 Arapoti-PR, Insc. Estadual: 903034785, CNPJ: 06.143.681/0001-23, Tel: (43) 3557-4814
Emails: qualidade@biosani.net.br / sac@biosani.net.br

FINALIDADE:

A sonda Retal é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para introduzir água ou solução laxativa no intestino.

A sonda retal apresenta-se como um tubo de Pvc 400 mm flexível com uma das extremidades aberta com apenas um (1) orifício na lateral. A ponta da Sonda deve estar isenta de rebarba. Na outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa (Na sonda com perfusor, ao invés do conector temos um perfusor.)

A sonda retal apresenta variações de diâmetro conforme o calibre da sonda. A sonda retal é comercializada nos modelos do nº 04 ao 32.

A sonda retal é uma sonda de alívio, a permanência é transitória não podendo permanecer mais do que 6 horas no paciente.

O produto tem como finalidade aliviar a tensão provocada por gases e líquidos no intestino grosso. Utilizável também para retirar conteúdo fecal através do reto.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Sonda de alívio embalada em embalagem individual, asséptica que apresenta em um dos lados papel grau cirúrgico e do outro filme em polietileno/polipropileno, vedado por termoselagem.

SONDA RETAL N°

04 06 08 10 12 14 16 40 cm
18 20 22 24 26 28 30 32

SONDA RETAL COM PERFUSOR N°

18 20 22 24 26 15 cm

MODO DE USO.

- O procedimento deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;
- Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
- Conectar a sonda Retal na sua borracha
- Lubrificar a sonda retal;
- Colocar a solução laxativa dentro do irrigador;
- Retirar o ar da borracha;
- Introduzir a sonda conforme técnica médica;
- Escoar lentamente o líquido até restar pequena quantidade no irrigador e em seguida clampar o irrigador.
- Orientar o paciente a reter a solução o quanto puder;
- Oferecer comadre a mão e realizar higiene.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:

- O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.
- Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinado na técnica própria à ser utilizada.
- Deve assegurar a compatibilidade de uso com seringas e irrigador.
- A conexão entre o tubo de PVC e os conectores deve suportar as condições normais de uso do produto.
- O produto deve ser armazenado em local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem.
- Evitar a aplicação do produto em condutos que estejam irritados e/ou inflamados. Uso em alguns casos, da aplicação de lubrificante na sonda para diminuir o traumatismo quando de sua aplicação.
- Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, componentes soltando, presença de material estranho.
- A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada, úmida deve estar impresso o número do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade.
- O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.
- Produto de uso único estéril e aprotético. Deve ser descartado após o uso. Não podendo ser reutilizado.

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

REGISTRO ANVISA/MS Nº
8.02860.0.9008

- MEDIO RISCO

Responsável Técnico:

SONIVAN FELIX DE ABREU

CRQ: IX 09.301988 -PR

FABRICADO POR:

Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.

Avenida Thereza de Souza Carneiro, 1327 – Distrito Industrial Hugo Parin.

CEP 84.990-000 - Arapoti – PR

Email: sac@biosani.net.br

Telefone: (0xx43) 3557 – 4814

CNPJ: 06.143.681/0001-23

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO

Lote:

Fabricação:

Validade: