



# INSTRUÇÃO DE USO

## STERILE DRAPE INGÁMED

### Apresentação Comercial

01 caixa contém 50 envelopes com 01 STERILE DRAPE INGÁMED cada.  
Cada embalagem (envelope) contém 01 adesivo plástico medindo 25 x 15 cm.

### Instruções de Uso

1. Abrir o pacote sem contaminar seu conteúdo e entregar ao auxiliar paramentado e preparado para manusear o conteúdo estéril.
2. Preparar a área cirúrgica com técnica de assepsia certificando-se de que esteja completamente seca para receber o STERILE DRAPE INGÁMED. Posicionar o STERILE DRAPE INGÁMED para o lado direito ou esquerdo, de acordo com o olho que será operado. Retirar o papel que está colado no plástico adesivo, o qual deverá ser colocado no rosto do paciente. As áreas aderentes do plástico deverão ser colocadas de maneira que o olho ocupe posição central.
3. Pressionar levemente o plástico para que cole na pele.
4. Descartar após o uso.

### Transporte e Armazenamento

Transportar e armazenar o produto em temperatura ambiente, em local seco, limpo e protegido de luz para garantir a integridade do produto e da embalagem.

### Advertências e Precauções

- Produto estéril por Óxido de Etileno.
- Não utilizar o produto, caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
- Não utilizar após a data de validade indicada na embalagem.
- Após o processo de esterilização, esta embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril.

### Registro ANVISA nº 80086720030

#### Fabricado por:

Razão Social: Ingá Materiais Médico Hospitalares Ltda  
CNPJ: 04.037.992/0001-82  
Endereço: Av. Paraná, 438, Centro. Perobal, PR – Brasil

**Responsável Técnica:** Ana Paula Alves Guilherme – CRF/PR 31.200

#### Distribuído por:

Razão Social: Ingá Materiais Médico Hospitalares  
CNPJ: 04.037.992/0003-44  
Endereço: Rod. Eng. Osvaldo Pacheco de Lacerda, 720, Parque Industrial. Maringá, PR – Brasil

LIGAÇÃO GRATUITA 0800-702-4650