

1 - Nome do produto:

SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART

2 – Indicação, Finalidade ou uso a que se destina o produto:

O “Swab” é utilizado na coleta de materiais para testes microbiológicos com finalidade clínica ou de pesquisa e quando a coleta executada no paciente não puder ser analisada em curto espaço de tempo, para o qual a amostra é inserida no tubo contendo o meio, para conservar a flora bacteriana coletada.

3- Descrição detalhada do produto:

Swab para coleta e transporte de amostras com meio Stuart, com haste de plástico, madeira e alumínio.

4 - Composição:

Polipropileno, Polietileno, haste de plástico, madeira e alumínio, Fibra de viscosa e meio de cultura Stuart.

Tipo de esterilização: Raios Gama

Validade do produto: 24 meses

PRODUTO ESTÉRIL

5 - Precauções, Restrições, Advertências, Cuidados especiais:

Utilizar luva de procedimento.

Deve ser utilizado assim que a embalagem for aberta.

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.

Respeitar o prazo de validade.

ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.

Descarte:

Descartar o material em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

6 - Esclarecimentos sobre o modo de uso do produto:

Verificar a integridade da embalagem e prazo de validade.

Abrir a embalagem no momento do seu uso.

Realizar a coleta da amostra com o Swab.

Remover a tampa do tubo.

Inserir o Swab com a amostra no tubo e fechar.

Proceder a análise da amostra de acordo com as normas da instituição de saúde.

Após a utilização do “Swab” no teste laboratorial, descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Manusear o material destinado aos testes microbiológico, devidamente paramentado e no local especificado para os mesmos.

7 – Armazenamento:

Armazenar em local limpo, seco e protegido da luz direta do sol.

8 - Formas de Apresentação:

Os Swabs para coleta e transporte de amostras com meio Stuart são embalados individualmente e acondicionados em caixas com 100 unidades.

Importado e Distribuído por:

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA.

Rua San José, nº 305 – Parque Industrial San José

Cotia/SP. - CNPJ: 48.740.849/0001-28

Fabricado por:

Citotest Labware Manufacturing CO., Ltd.

339, Beihai West Road, Haimen, 226100, Jiangsu

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (11) 2712-7002

e-mail: sac@cralplast.com.br

REVISÃO 00 DE 06/2011