

## INSTRUÇÃO DE USO - TORNEIRA DESCARTÁVEL

**Nº REGISTRO** 80288090101

**NOME TÉCNICO** Torneiras

**INDICAÇÃO DE USO** A Toneira Descartável é utilizada como complemento de equipos, com função de administração simultânea de múltiplas soluções endovenosas, é um dispositivo especialmente desenhado para administrar simultaneamente drogas e soluções endovenosas.

**MECANISMO DE AÇÃO** A Torneira Descartável é um intermediador nas conexões entre produtos médico-hospitalares, devendo assegurar a compatibilidade de uso com equipos de soluções parenterais, cateteres, escalpes e dispositivos que adaptem-se em conectores padrão 6% conforme a ABNT NBR ISO 594.

**INSTRUÇÃO DE USO**

- 1) Abrir a embalagem de forma asséptica;
- 2) Retirar o dispositivo do invólucro protetor, retirar a tampa protetora do conector luer;
- 3) Adaptar o conector luer slip ou luer lock ao dispositivo de punção venosa;
- 4) Fechar a Torneira Descartável girando o primeiro manípulo giratório próximo ao dispositivo de punção venosa, direcionando o lado sem seta;
- 5) Retirar a tampa protetora de um dos conectores luer fêmea;
- 6) Conectar o equipo ou seringa com o medicamento no conector fêmea;
- 7) Abrir a Torneira Descartável girando o manípulo giratório, direcionando uma das setas para o conector fêmea e outra para o dispositivo de punção venosa;
- 8) Administrar o fluido desejado e avaliar a eficácia da infusão;

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES** Artigo médico hospitalar de uso único, estéril, descartável. Esterilizado por Óxido de Etileno. Validade de cinco anos. Manter o produto em ambiente limpo, seco e fresco; temperatura ambiente e com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO** **TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**  
**Matriz:** Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 220 | CIC | CEP: 81290-270 | Curitiba | PR | Brasil | Fone: +55 41 3022.0926  
**Filial:** Av. Nilo Bittencourt, 55 | Unidade 05 | São Vicente | CEP: 88312-400 | Itajaí | SC | Brasil  
[www.tklbrasil.com.br](http://www.tklbrasil.com.br) | [comercial@tklbrasil.com.br](mailto:comercial@tklbrasil.com.br) | @tkl\_brasil  
Responsável Técnica: Camila A. de M. Buzzatto | CRBM-6 1245