

|   |   |
|---|---|
|  <p style="text-align: center;"><b>FICHA TÉCNICA</b></p> | <b>Versão:</b><br><p style="text-align: center;">1</p>                    |
| <p style="text-align: center;"><b>Produto: CATETER PARA INALAÇÃO DE OXIGÊNIO<br/>CATETER-OX / CATETER TIPO ÓCULOS</b></p>                 | <b>Cadastro ANVISA:</b><br><p style="text-align: center;">10252420037</p> |

**Indicação:**

A família do Cateter Nasal para Oxigênio é indicado para introduzir oxigênio ou misturas gasosas em narina dos pacientes necessitando de oxigenação ou aeração.

**Especificação do Produto**

A família do Cateter Nasal para Oxigênio tem como finalidade de fornecer oxigenação ou aeração ao paciente com a introdução do Cateter Nasal na narina. A extensão em PVC é introduzida na narina e o conector proximal adequadamente conectado à fonte de gás. O fluxo e a composição da mistura gasosa são controlados pelos operadores do procedimento. Produto isento de látex em sua composição.

**Foto Ilustrativa**



**Modo de usar:**

- Retirar o cateter da sua embalagem original;
- Introduzir cuidadosamente na narina conforme indicado;
- Conectar o cateter à fonte de gás e controlar o fluxo gasoso conforme indicado;
- Se necessário fixar a parte proximal do tubo ao rosto do paciente com fita adesiva adequada;
- Exclusivamente para a apresentação de cateter tipo óculos, posicionar o tubo como alça de sustentação entre os pavilhões auriculares e a cabeça fixando-os com a presilha sob o queixo ou atrás da nuca;

|   |   |
|---|---|
|  <p style="text-align: center;"><b>FICHA TÉCNICA</b></p> | <b>Versão:</b><br><p style="text-align: center;">1</p>                    |
| <p style="text-align: center;"><b>Produto: CATETER PARA INALAÇÃO DE OXIGÊNIO<br/>CATETER-OX / CATETER TIPO ÓCULOS</b></p>                 | <b>Cadastro ANVISA:</b><br><p style="text-align: center;">10252420037</p> |

**Precauções e Advertências:**

- Não utilize o produto antes de ler e compreender totalmente as instruções de uso;
- Abrir assepticamente a embalagem, a fim de garantir a esterilidade do produto;
- A embalagem primária deve ser aberta apenas no momento de uso do produto;
- O produto só deve ser manuseado por profissional devidamente qualificado e que conheça os procedimentos adequados de utilização do produto;
- Uma vez utilizado, o cateter para oxigênio deverá ser descartado. Em hipótese alguma o cateter pode ser reaproveitado;
- Não introduzir mais de três cm na narina nem administrar grandes quantidades de gás (mais de 3L/min.) evitando desconforto ao paciente;
- Em caso de necessidades maiores de oxigênio, serão necessários outros métodos de administração;
- A introdução e retirada do cateter na narina devem ser cuidadosa e suave para não causar desconforto ao paciente. Movimentos de introdução ou retirada intempestivos podem causar desconforto e devem ser efetuados apenas por profissionais devidamente habilitados;
- A EMBRAMED não se responsabiliza por danos causados pela utilização imprópria do produto;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- As condições de utilização estão asseguradas dentro do prazo de validade de 36 meses, desde que a embalagem não esteja danificada;
- Não utilizar o produto após a expiração da data de validade (indicada na etiqueta que se encontra na embalagem);
- Observar o empilhamento máximo indicado na caixa de papelão, manter em temperatura ambiente, em local seguro, longe do calor e umidade excessivos;
- Ao transportar tomar as devidas precauções, para que não ocorra qualquer tipo de dano à embalagem e ao produto, utilizar veículo fechado, protegido contra umidade e calor. Ao transportar verifique o empilhamento máximo, indicado na caixa de papelão.

**PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO.**

Estéril – Esterilizado com gás de óxido de etileno ou radiação gama.

**Responsável Técnico**

Leticia Teixeira – CRF – SP N° 26.261