

Proteção eficaz  
contra a transmissão  
da COVID-19



# Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack

A Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack foi desenvolvida para proteção do usuário contra doenças transmissíveis por via aérea, através de gotículas respiratórias, minimizando tanto a contaminação do ambiente quanto do usuário. Este produto é um importante aliado para a proteção eficaz contra a transmissão da COVID-19.

## Qual a composição das Máscaras Cirúrgicas Descarpack?

A Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack é fabricada em não tecido 100% polipropileno, disponível em duas cores: azul e branca, nos modelos com elásticos ou com tiras.

A Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack possui três (03) camadas com diferentes funcionalidades, sendo estas:

- 1º camada – Spunbonded: Camada externa, com característica repelente a fluídos.
- 2º camada – Meltblown: Camada intermediária, com característica filtrante.
- 3º camada – Spunbonded: Camada interna, com característica hidrofílica que permite absorção de secreções salivares.

A Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack possui eficiência de filtragem bacteriana  $\geq 95\%$ . Sua proteção e eficiência é assegurada devido composição das camadas, por isto, você não deve alterá-la ou modificá-la de nenhuma maneira.



## Qual maneira correta da vestir a Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack?

As máscaras possuem um lado correto para utilização, para que sua total proteção seja garantida.

A primeira camada, composta de Spunbonded, e com característica repelente, deve ficar externa à sua face.

A terceira camada, com característica hidrofílica, deve ficar em contato com seu rosto.

O correto posicionamento das máscaras garante que as partículas externas que entram em contato com a máscara sejam devidamente repelidas e as partículas geradas pela própria secreção salivar sejam absorvidas, minimizando também a contaminação do ambiente com secreções respiratórias.

As máscaras possuem três pregas que servem para ajustar a máscara ao seu rosto, e devem, portanto, cobrir seu nariz, boca e queixo, garantindo a proteção durante o uso. O correto ajuste do clipe nasal também deve ser feito para lhe proporcionar maior conforto e segurança.

## Como identificar a parte externa da Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack?

Basta localizar nas laterais do corpo da máscara o lado onde os elásticos ou tiras estão soldados. O lado que contém a solda deve ficar externo ao seu rosto.


No modelo azul é ainda mais fácil: o tecido azul deve ser posicionado para o lado externo.

1 - Clipe Nasal Ajustável: tira de alumínio revestida maleável que garante ajuste ao nariz.

2 - Pregas que se ajustam ao rosto

3 - Tripla camada não-tecido com filtragem bacteriana  $\geq 95\%$

4 - Modelos com Elástico ou tiras, para fixação ao rosto.

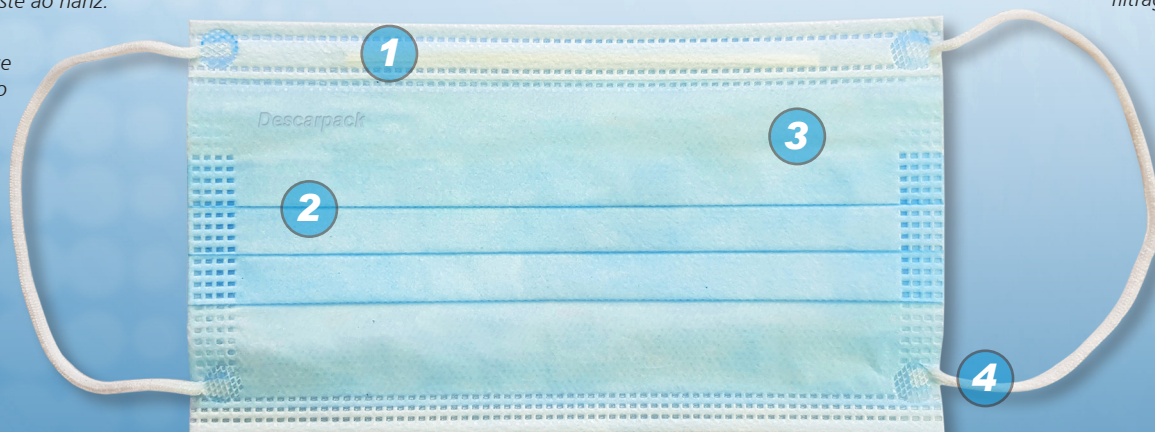

## Orientações e Precauções

A máscara é de uso individual, não compartilhe com outras pessoas;

A máscara é de uso único e descartável. Não lave ou higienize com álcool ou qualquer outro desinfetante. Evite tocar a máscara durante uso;

Se necessário, manuseie pelas tiras ou elásticos laterais;

Higienize sempre as mãos, antes e depois do contato com a máscara;

Troque a máscara sempre ela estiver úmida ou suja.



Previna-se!  
Use máscara.  
Um ato de amor  
ao próximo.



**DESCARPACK**  
Efficiency in Disposables

Você pode adquirir as Máscaras Cirúrgicas Triplas com a segurança e qualidade Descarpack, que você já conhece, através de nossa loja virtual:

<https://loja.descarpack.com.br/>

Se você é distribuidor, consulte nossa equipe de vendas:

### Linha Hospitalar

#### Leandro Boani

RJ / MG / ES

Cel: + 55 (11) 9.9742.1437

Skype: vendas1.descarpack

Email: vendas1@descarpack.com.br

#### Wellington Araujo

AC / PE / RO / RR / TO

Cel: +55 (11) 9.9801.0118

Skype: vendas6.descarpack

E-mail: vendas6@descarpack.com.br

#### Israel Marçal

BA / PB / RN / AL / SE

Cel: +55 (11) 9.4139.5678

Skype: vendas5.descarpack

E-mail: vendas5@descarpack.com.br

#### Conrado Araújo

DF / GO / SC / RS

Cel: + 55 (11) 9.6397.8675

Skype: vendas3.descarpack

E-mail: vendas3@descarpack.com.br

#### Simone Mietti

SP / MT / MS / PR

Cel: + 55 (11) 9.4275.3118

Skype: vendas2.descarpack

E-mail: vendas2@descarpack.com.br

#### Eduardo Pires

AM / AP / CE / MA / PA / PI

Cel: +55 (11) 9.7090.6275

Skype: vendas7.descarpack

E-mail: vendas7@descarpack.com.br

### Linha Farma

#### Marcia Tomaz

ES / RJ / MG

Cel: +55 (11) 9.4109.7795

Skype: vendasfarma1@descarpack

E-mail: vendasfarma1@descarpack.com.br

#### Mariana Galdino

SP / PR / MT / MS

Cel: +55 (11) 9.4212.3555

Skype: vendasfarma2@descarpack

E-mail: vendasfarma2@descarpack.com.br

#### André Luiz

DF / GO / SC / RS

Cel: +55 (11) 9.4290.0555

Skype: vendasfarma3@descarpack

E-mail: vendasfarma3@descarpack.com.br

### Linha Profissional

#### Ohana Cavalheiro

MG / RJ / ES

Cel: +55 (11) 9.4375.9678

Skype: vendaspro1.descarpack

E-mail: vendaspro1@descarpack.com.br

#### Gustavo Cabriotti

SP interior / PR / MT / MS

Cel: +55 (11) 9.7360.4235

Skype: vendaspro2.descarpack

E-mail: vendaspro2@descarpack.com.br

#### Yago Marcelino

AC / AL / AM / AP / BA / CE / MA / PA / PB /

PE / PI / RN / RO / RR / SE / TO

Cel: +55 (11) 9.3030.1986

Skype: vendaspro7.descarpack

E-mail: vendaspro7@descarpack.com.br

#### Lidivania Oliveira

SP capital e Grande São Paulo

Cel: +55 (11) 9.3030.1921

Skype: vendaspro2.capital

E-mail: vendaspro2.capital@descarpack.com.br

#### Valmir Benício

DF / GO / SC / RS

Cel: +55 (11) 9.6185.5438

Skype: vendaspro3.descarpack

E-mail: vendaspro3@descarpack.com.br



**55 (11) 3649.5555**  
Descarpack.com.br



**DESCARPACK**  
Efficiency in Disposables