



INSTRUÇÕES DE USO - ESTETOSCÓPIOS SIMPLES PREMIUM

INDICAÇÃO DE USO

O Estetoscópio Simples Premium é indicado para a ausculta não invasiva dos ruídos cardíaco-respiratórios do organismo.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Simples e Simples Pediátrico: Estetoscópio completo com tubo em "Y" e auscultador simples ou simples pediátrico. Embalado em Caixa de Papelão.

COMPONENTES



- 1- Membrana de plástico rígido;
- 2- Anel rosqueado de cobre cromado;
- 3- Auscultador;
- 4- Tubo em "Y" de PVC;
- 5- Câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado);
- 6- Fone biauricular de cobre cromado;
- 7- Par de Olivas Rígidas.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os sons são obtidos através do contato do diafragma com a região de interesse. Esses sons são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do operador. O fone biauricular permite escutar simultaneamente o som com os dois ouvidos.

O Estetoscópio Tipo Simples possui apenas um auscultador simples que pode ser do tamanho adulto ou infantil.

MODO DE USAR

Encaixar o fone biauricular nos ouvidos de maneira a isolar todos os sons externos;
Encostar o diafragma na área a ser analisada;
Esfregue levemente o diafragma para saber se as olivas estão posicionadas corretamente nos ouvidos;

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Não exponha o dispositivo em temperaturas extremas, umidade, poeira ou luz direta.
Guarde-o em embalagem própria.

Limpe o dispositivo com um pano macio e levemente umedecido com água. Não use produtos químicos.

Segure o tubo com cuidado. Não puxe.

O tubo também não deve sofrer deformações ter as bordas afiadas ou ser tocado por materiais cortantes.

Não deixe cair o instrumento. Evite vibrações fortes.

Nunca abra o dispositivo. Se isto ocorrer, a calibração do fabricante torna-se inválida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de armazenagem recomendada: 0°C a 50°C.

Umidade relativa do ar de armazenagem recomendada: máxima de 80%.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Siga as instruções de armazenamento e conservação do equipamento. Guarde-o em embalagem própria, evitando assim o acúmulo de impurezas. Para a limpeza, utilize um pano macio e levemente umedecido com água. A desinfecção pode ser realizada utilizando um pano umedecido com álcool. Não utilizar agentes de limpeza abrasivos, e não imergir o estetoscópio em líquidos.

Mantenha o equipamento e sua área de trabalho limpos, para assegurar os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos.

REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS CREDENCIADAS: CONSULTAR O NOSSO SITE, WWW.ACCUMED.COM.BR OU LIGUE PARA: 0800 0521600

TERMO DE GARANTIA

O Estetoscópio Simples Premium tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ACCUMED:

Tel.: 0800 052 1600

e-mail: sac@accumed.com.br

Detentor da Notificação: Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.

CNPJ: 06.105.362/0001-23; Inscrição Estadual: 77.701.290

Rodovia Washington Luiz, 4370 Galpões G, H, J, K e L - Vila São Sebastião

Duque de Caxias – RJ - CEP: 25055-009

Comercial Tel.: (21) 2126-1600

Notificação ANVISA: 80275310052

Fabricante: Ningbo Sifang Medical Instruments Co., LTD.

No. 26 Laoshan Road, Dagang Industrial Zoo, Beilun District, Ningbo, China.

Rev03_210923