



# Lanceta de Segurança Descarpack

## DESCRIÇÃO

A **Lanceta de Segurança Descarpack** é um dispositivo perfurocortante de uso único, atóxico, apirogênico e estéril.

É fabricada atendendo aos critérios na NR 32 em questões de dispositivos de segurança.

Oferece conforto e segurança devido ao seu mecanismo de ação tipo mola, onde a agulha contida na **Lanceta de Segurança Descarpack**, fica todo o tempo no interior de invólucro, sendo apenas acionada após a pressão do invólucro sobre a pele. Após a punção a agulha retrai-se permanentemente, protegendo os pacientes e os profissionais de saúde contra acidentes com material contaminado.

A cânula da **Lanceta de Segurança Descarpack** é confeccionada em aço inoxidável e bisel trifacetado, desenvolvidas para reduzir a resistência na superfície da pele, não sendo visível ao paciente.

## PRODUTO



**Cadastro ANVISA:** 10330660235

**Fabricante:** Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., Ltd.

## INDICAÇÃO DE USO

A **Lanceta de Segurança Descarpack** é um dispositivo desenvolvido para punção superficial da pele, afim de obter amostras de sangue capilar utilizadas em doseamentos laboratoriais.

## MODELOS DISPONÍVEIS

A **Lanceta de Segurança Descarpack** está disponível nos seguintes modelos:

Tamanho	Diâmetro	Comprimento	Cor
21 G	0,80 mm	18,5 mm	Ciano
23 G	0,60 mm	18,3 mm	Vermelho
28 G	0,36 mm	18,3 mm	Azul

## COMPOSIÇÃO

- ❖ **Cânula:** Aço inoxidável;
- ❖ **Invólucro de Plástico:** ABS (estireno + butadieno + acrilonitrila);
- ❖ **Tampa de Proteção:** ABS (estireno + butadieno + acrilonitrila);
- ❖ **Lubrificante:** Silicone grau médico.

## VALIDADE

Cinco (05) anos após data de fabricação.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
21 G	0600301	100 unidades	4000 unidades
23 G	0600401	100 unidades	4000 unidades
28 G	0600101	100 unidades	4000 unidades

## INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Faça a assepsia da área.
- ❖ Gire e puxe a tampa protetora da lanceta de segurança para removê-la;
- ❖ Posicione sobre o local onde se fará a coleta. Com um movimento firme, pressione a lanceta para perfura-lo;
- ❖ Coloque o sangue na tira para realização do ensaio;
- ❖ Limpe o local da punção com um algodão seco;

- ❖ Descarte a lanceta de segurança em um coletor de resíduos perfurocortante apropriado.

## **ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES**

---

- ❖ Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- ❖ Não utilizar a lanceta caso o invólucro esteja danificado, a agulha exposta ou sem a capa protetora;
- ❖ Produto esterilizado por Radiação Gama;
- ❖ Produto médico hospitalar de uso único;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.