

FICHA TÉCNICA *Polax*[®]

Campo Operatório Estéril Polax - POL15

Produto	Código	Shirink	Produto p/ Cx. Master	Medidas Caixa Master			Código de Barras DUN Cx. Master	Código de Barras EAN Produto	Classificação Fiscal
				Altura (cm)	Largura (cm)	Comp. (cm)			
C.O. Estéril 15g 25x28 Emb.Dupla C/RX	POL15	150x5 un.	150 pacotes	40	45	56	7898522425158	7898522424946	3005.90.90



Nome Comercial: Compressa cirúrgica estéril Polax 25x28

Código de Faturamento: POL15

Modo de Uso

- É indicada para uso hospitalar em cirurgias em geral, para absorver sangue, líquidos e outras secreções. Também é utilizada em cirurgias cavitárias como anteparo atraumático para tecidos e órgãos.
- A alça do campo operatório deve ser mantida do lado externo da cavidade cirúrgica, envolvendo o pulso do cirurgião ou não, como forma de precaução, facilitando, assim, seu manuseio e oferecendo melhores condições de visibilidade no local da cirurgia.

Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- Produto de uso único. Proibido reutilizar. Destruir após o uso.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.

Especificações do Produto

- Produto esterilizado por óxido de etileno (ETO)
- Dimensão: 25 cm x 28 cm
- Massa mínima por unidade: 15 gramas
- Possui elemento radiopaco (C/RX)
- Registro da Anvisa: 10341660009
- Classificação de Risco: I - Baixo Risco
- É pré-lavado e possui embalagem dupla
- Embalagem interna: acondicionado em envelopes de papel de grau cirúrgico com 5 campos cada.
- Embalagem externa: acondicionado em caixa de papelão com 150 envelopes, totalizando 750 campos.

Descrições do Produto

- Fabricado com tecido 100% algodão
- Possui camadas de gaze sobrepostas fixadas entre si, o que evita o deslizamento entre elas.
- É alvejada, isenta de amido, alvejantes ópticos, corantes corretivos e quaisquer outros que possam agredir a pele.
- Possui alça fabricada com cadarço duplo, firmemente unida ao seu corpo.
- As bordas possuem bainhas tipo "overlock" para evitar o desfiamento.
- Possui excelente capacidade de absorção e retenção de líquidos e secreções.

Condições de Armazenamento

- Para manutenção da integridade das embalagens, deve-se manter a embalagem intacta e evitar manuseios desnecessários.
- O armazenamento deve ser feito em local apropriado, em cima de estrados ou pallets, evitando contato direto com o piso.
- Empilhamento máximo: 4 caixas.

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Patrícia Ramos Gomes | CRQ 02103006