

KIT CIRURGIA GERAL ESTÉRIL POLAR FIX

Indicação de uso: Garantir a devida proteção do paciente e do profissional da saúde, minimizando transferências cruzadas de agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos. Combina conforto, maleabilidade e alta resistência ao rasgo e fricção.

Instrução de uso:

Cobertura de Mesa de Instrumentos: Posicionar no centro da mesa e abrir no sentido da largura da mesa (direita/esquerda);

Cobertura Mesa de Mayo: Posicionar seguindo a dobra asséptica.

Campo Inferior: Posicionar o campo abaixo da área de incisão, fixar com a fita adesiva segurando as extremidades e puxando no sentido dos pés do paciente;

Campo Superior: Posicionar o campo acima da área de incisão, fixar com a fita adesiva segurando as extremidades e puxando no sentido da haste até fixá-la.

Campo Lateral: Posicionar os campos lateralmente à área de incisão e fixar com a fita adesiva.

Bolsa de Instrumentos: Aderir no local desejado.

Advertências / Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

Anvisa nº: 8003400007

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Produto esterilizado por óxido de etileno

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP

CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64

Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: 0800 191099 – sac@polarfix.com.br

Responsável Técnica: Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339

www.polarfix.com.br