



OPTIGERM PRONTO-USO

DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Para aumentar a adesão de uso dos profissionais aos protocolos de limpeza, desinfecção e alvejamento, precisamos de uma solução que ofereça praticidade e segurança, requisitos que só a marca Optigerm pode oferecer.



1
MIN

1 min de contato incluindo bactérias

3
MIN

3 min de contato para esporo *Clostridium difficile*

30
DIAS

Efeito residual de 30 dias



Compatível com monitores



DESCRIÇÃO

Optigerm é um limpador desinfetante pronto uso para superfícies fixas e artigos não críticos. Desenvolvido para instituições que oferecem assistência à saúde com máxima excelência, também em locais que oferecem maior risco aos pacientes e profissionais de saúde com amplo espectro e rápida ação, unindo praticidade e segurança em uma única operação.

ATRIBUTOS



Dispensação em espuma, evitando danos à equipamentos



Produto pronto-uso



Limpa e desinfeta em uma única operação;



Mistura sinérgica de quaternário amônio de 5ª geração e biguanida



Laudos contra: vírus, fungos, bactérias multirresistentes, bacilos, esporos e micobactérias



Alto poder de limpeza com ação contra o Biofilme



Rendimento de 0,5m² por borrifada.



Laudos de compatibilidade de superfície e ataque químico

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Recomendado para instituições que ofereçam assistência à saúde: hospitais, clínicas, veículos de resgate médicos, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios [...]



SUPERFÍCIE

Compatível com diversos materiais, inclusive equipamentos, monitores e telas touch.

DILUIÇÃO

Optigerm é pronto uso e não deve ser diluído.

MODO DE USAR



Borrifar o Optigerm no aplicador de preferência não tecido e descartável.



Aplicar o pano embebido com o Optigerm sobre a superfície desejada no sentido unidirecional. Aguardar tempo de ação recomendado.



Em incubadoras

Limpeza concorrente: aplicar Optigerm apenas na parte externa da incubadora. Limpeza terminal: lavar com água e sabão neutro conforme POP interno, para remoção de excesso de resíduos e finalizar o procedimento com Optigerm promovendo a desinfecção.

USO DE EPIs



LUVAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Líquido transparente, cor verde
Odor	Característico, sem fragrância
Densidade a 20/40°C	1,000 a 1,010
pH a 25°C	9,0 a 10,0
Índice de refração a 20°C	1,3382 a 1,3390

COMPOSIÇÃO

- ✓ Polihexametileno biguanida (PHMB): 1.600 ppm
- ✓ Quaternário de amônio 5ª Geração: 2.400 ppm
- ✓ Agentes de limpeza, ação contra biofilme e outros ingredientes: q.s.p. 100%

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixa com 4 embalagens de 5 litros - refil
- ✓ Caixa com 6 frascos de 1 litro com pulverizador/espuma
- ✓ Caixa com 12 frascos de 490 ml com pulverizador/espuma

VALIDADE

24 meses à partir da fabricação indicada no rótulo.

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	3.01003-2
Registro ANVISA/MS	3.1003.0111
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evitar a inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consultar um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Centro de Intoxicações - Tel.: 0800 771 3733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

