



PAPEL TERMOSENSÍVEL ULSTAR

REGISTRO ANVISA 10296900059

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Verificar e confirmar a largura do papel para uso na impressora
- 2) Selecione o tipo de papel para o tipo de impressora a ser utilizado
- 3) Rasgar o saco de plástico para obter o rolo de papel, e remover a etiqueta colocada à parte superior do rolo de papel
- 4) Manter o bin da impressora aberto para carregar o papel
- 5) Em seguida, coloque o pacote no esterilizador.
- 6) Retirar os primeiros 15 a 20 cm (6 a 8 polegadas). Estas primeiras partes podem ter um pouco de pó, e causar má qualidade de impressão.
- 7) Não dobrar o papel ou tocar na superfície impressa. Poeira ou digitais podem causar má qualidade de impressão.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Este produto é para uso em impressoras térmicas apenas;

Esse produto não é, em si, o dispositivo de tratamento médico.

Não utilizar qualquer parte desse produto após a impressão;

Não use esse produto caso a embalagem esteja aberta, rasgada, molhado ou o papel escurecido.

Mantenha o papel em local escuro, fresco e seco, caso contrário, a impressão pode desaparecer gradualmente.

Não aplicar os seguintes produtos na superfície do papel impresso: fitas plásticas, borrachas plásticas, toner, vinil, tinta de marcador.

Não colocar solvente volátil orgânico, tal como o álcool, na superfície do papel impresso.

Este material destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas repassadas por um profissional da área de saúde ao paciente.



ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33
Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joamed.com.br
Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

