

INSTRUÇÕES DE USO

Hydrofilm Plus

Curativo Transparente Auto adesivo com compressa absorvente

ESTÉRIL

- **Apresentação:**

Hydrofilm Plus é um curativo transparente auto adesivo, com compressa absorvente, indispensável na medicina moderna de tratamento de lesões. Confere excelentes capacidades de proteção contra infecções secundárias das lesões.

- **Características:**

- Impermeável a microorganismos e à prova d'água, Hydrofilm Plus permite no entanto a passagem de oxigênio e do vapor de água. Formando uma barreira à passagem de fungos e de bactérias, proporciona uma respiração saudável da pele. Este processo ajuda a prevenção de irritações da pele em torno da lesão.
- A compatibilidade cutânea de Hydrofilm Plus, deve-se à utilização de um adesivo hipoalergênico, indicado para todos os tipos de pele, bem como para pacientes com tipos de pele hipersensíveis.
- Apesar de possuir uma total capacidade de fixação à pele, ao ser retirado não provoca qualquer dor, tão pouco destrói as novas células epiteliais. Apresenta
- Hydrofilm Plus é extremamente fino e elástico adaptando-se de uma forma perfeita à pele e aos contornos do corpo. Facilmente aplicável, mesmo quando da utilização de luvas de intervenção, graças a uma folha rígida de proteção aplicada numas das suas extremidades.
- Tratando-se de um adesivo totalmente transparente, a observação da lesão bem como da pele ao redor é feita sem necessidade de remoção. O mesmo se aplica quando da sua utilização para fixação de cânulas e cateteres.
- Através de sua impermeabilidade à água, a limpeza diária é facilitada, uma vez que o banho diário pode ser tomado, sem a necessidade de retirar o adesivo.
- Possui compressa absorvente macia de tecido não tecido para melhor conforto e absorção de secreções no local da ferida.

- **Indicações:**

Hydrofilm Plus emprega-se principalmente para cobrir e proteger feridas secas, não infectadas e com


secreções escassas podendo ser usado nos cuidados estéreis do pós operatório. Hydrofilm Plus pode também ser usado como barreira à prova de água e de germes cobrindo curativos absorventes ou para segurar cânulas ou cateteres. Sua compressa absorvente extra macia de tecido não tecido facilita a remoção do curativo e garante uma melhor absorção local.

- **Contra Indicações:**

Não deve ser aplicado diretamente sobre feridas clinicamente infectadas, sangrantes ou fortemente dissecadas.

- **Modo de Usar:**

A aplicação é feita conforme ilustrações abaixo, seguindo os 4 passos numerados no papel adesivo no verso do curativo. Pode-se raspar zonas de pele muito pilosa antes da aplicação caso desejado. Posicionar a compressa nos cateteres e tubos para que a remoção seja facilitada.

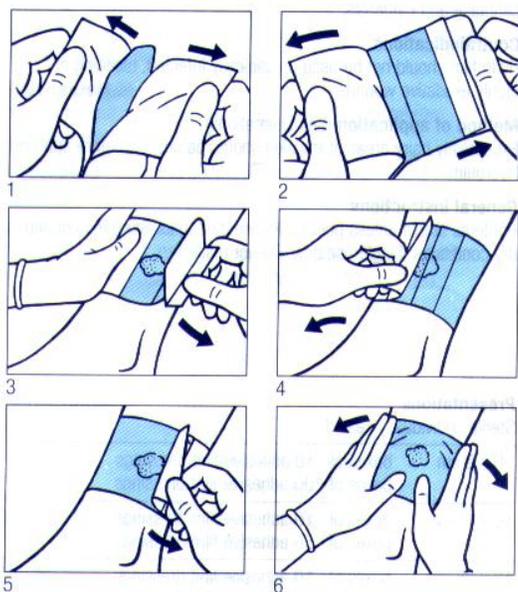

- **Condições de Armazenamento :**

Conservar em lugar fresco e seco. Conteúdo estéril se embalagem intacta. Não reesterilizar. Manter fora do alcance das crianças.

- **Composição:**

Hidrofilm Plus não contém nenhum medicamento ativo

Filme

Material: Polímero de Poliuretano Termoplástico

Adesivo

Material: Acrilato

Compressa:

Tecido não tecido de viscose

- **Apresentação:**

HYDROFILM PLUS

5 x 7 cm	-	pacote com 5 e 50 unidades
5 x 7,2 cm	-	pacote com 5 e 50 unidades
8 x 12 cm	-	pacote com 30 unidades
9 x 10 cm	-	pacote com 5 e 50 unidades
9 x 15 cm	-	pacote com 5 e 25 unidades
10 x 12 cm	-	pacote com 25 unidades
10 x 20 cm	-	pacote com 5 e 25 unidades
10 x 25 cm	-	pacote com 25 unidades
12 x 25 cm	-	pacote com 20 unidades
10 x 30 cm	-	pacote com 25 unidades

Importado por:

Bace Comércio Internacional Ltda
Av. Copacabana, Nº325 – 12ºAndar - Conj. 1214-1516-17-18- Empresarial 18 do Forte - Barueri – SP
CEP: 06472-001
CNPJ: 47.411.780/0001-26
Fone: (11) 3168-0226

Fabricado na Alemanha por:

Paul Hartmann D-89522 Heidenheim

Responsável Técnica: Camila Siedlarczyk Schimite Tavares – CREA-SP: 5062442178

Autorização de Funcionamento: H1W2H4XHH791

N.º do Registro na ANVISA: 80170319006

N.º do Lote, Validade, Data da Esterilização: Vide Rótulo