



# Agulha Descarpack para Caneta de Insulina

## DESCRIÇÃO


A **Agulha Descarpack para Caneta de Insulina** é um dispositivo médico que deve ser utilizada em conjunto com as canetas de insulina, fazendo com que o tratamento do diabetes seja muito mais prático e simplificado.

Confeccionada em aço inoxidável, disponível no tamanho 4 mm x 0,23 mm, com bisel trifacetado e lubrificada, garantindo assim uma aplicação mais confortável e segura, com menor sensação de dor e menor risco de aplicações intramusculares.

O design padrão da **Agulha Descarpack para Caneta de Insulina** à torna compatível com as principais marcas de caneta de insulina disponíveis no mercado.

A **Agulha Descarpack para Caneta de Insulina** é estéril, atóxica, apirogênica e desenvolvida para tornar a aplicação de insulina mais fácil e segura.

## PRODUTO

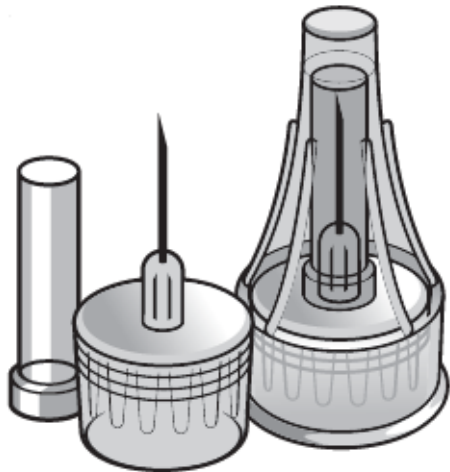

**Notificação Anvisa:** 10330660300  
**Fabricante:** Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

## INDICAÇÃO DE USO

A **Agulha Descarpack para Caneta de Insulina** foi desenvolvida para a administração subcutânea de insulina através de sistemas de liberação, como a caneta de insulina.

## MODELOS DISPONÍVEIS

A **Agulha Descarpack para Caneta de Insulina** está disponível no tamanho:

Tamanho	Sistema Métrico (mm)	Cor
32 G	4 mm x 0,23 mm	Verde

## COMPOSIÇÃO

- ❖ **Cânula:** Aço Inoxidável;
- ❖ **Canhão:** Polipropileno;
- ❖ **Tampa Protetora Interna:** Polietileno;
- ❖ **Tampa Protetora Externa:** Polietileno;
- ❖ **Lacre Protetor Externo:** Papel Grau Cirúrgico;
- ❖ **Lubrificante:** Silicone Grau Médico.

## VALIDADE

05 (cinco) anos após data de esterilização.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Tamanho	Código	Quant. Cartucho	Quant. Caixa Master
4 mm x 0,23 mm	0830101	100 unidades	10.000 unidades

## INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Retire o selo protetor da Agulha Descarpack para Caneta de Insulina;
  - ❖ Alinhe a Agulha Descarpack com a Caneta de Insulina e a mantenha reta até fixá-la;
- Nota: A Agulha Descarpack deve ser mantida reta durante a fixação para evitar que o lacre do refil de insulina seja danificado.*

- ❖ Retire a tampa protetora externa da Agulha Descarpack e guarde para remoção da agulha após a aplicação;
- ❖ Realize a aplicação da dosagem de insulina conforme orientação médica;  
*Nota: Cada Caneta de Insulina possui características distintas. Antes de utilizá-las, leia atentamente seu manual de instruções.*
- ❖ Retire a tampa protetora interna da Agulha Descarpack;
- ❖ Segure a Caneta de Insulina com a Agulha Descarpack voltada para cima;
- ❖ Faça a aplicação de insulina conforme orientação médica;
- ❖ Recoloque a tampa protetora externa da Agulha Descarpack cuidadosamente e desenrosque a Agulha Descarpack da Caneta de Insulina;
- ❖ Descarte a Agulha Descarpack em local apropriado.

## **ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES**

---

- ❖ Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- ❖ Sempre fixe uma nova agulha antes de cada uso;
- ❖ Verificar cuidadosamente a integridade do lacre protetor externo antes do uso;
- ❖ Não utilizar caso o produto esteja violado;
- ❖ Consulte o manual de instruções do fabricante da Caneta de Insulina antes do uso;
- ❖ Não utilizar se estiver fora do prazo de validade;
- ❖ Produto esterilizado com Óxido de Etileno;
- ❖ Esterilidade garantida até que o selo protetor da agulha seja aberto ou danificado;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Produto médico-hospitalar de uso único;
- ❖ Após o uso descartar em local apropriado.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.