

Classe: BACTERIOLOGIA

Gerado em 25/09/2023 14:31:46

Modelo

Características

23010P - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART HASTE PLÁSTICA CX/100

Finalidade: O Swab é utilizado na coleta de materiais para testes microbiológicos com finalidade clínica ou de pesquisa, quando o material coletado não puder ser analisado em curto espaço de tempo. Para isso a amostra é inserida no tubo contendo o meio, conservando a amostra coletada.

COMPOSIÇÃO - polipropileno, polietileno, poliestireno, rayon, meio de cultura Stuart.

Modo de usar:

1. Verificar a integridade da embalagem e prazo de validade.
2. Abrir a embalagem no momento de seu uso.
3. Realizar a coleta da amostra com o Swab.
4. Remover a tampa do tubo.
5. Inserir o Swab com a amostra no tubo e fechar.
6. Proceder a análise da amostra de acordo com as normas do laboratório.
7. Após a utilização do Swab no teste laboratorial, descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Precauções, Cuidados e Advertências

- Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada ou fora do prazo de validade.
- Manusear o material destinado aos testes microbiológicos devidamente paramentado e no local especificado para os mesmos.
- HASTE QUEBRÁVEL.
- PONTA RAYON

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar o produto em sua embalagem original, em local seco e arejado e protegido da luz do sol.

DESCARTE

Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO DE USO ÚNICO.

DESCARTAR APÓS O USO.

PRODUTO ESTÉRIL POR RAIOS GAMA

Registro(s) MS:

10379860075,10379860154,10379860211,10379860242,10379860260,10379860264,10379860200



RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP N° 151479



SUPRINDO A SAÚDE DESDE 1977

ANVISA SOB N° 1.03798.6

Catálogo de Modelos



Classe: BACTERIOLOGIA

Gerado em 25/09/2023 14:31:46

Pág. 2/2

Modelo

Características